

# Comment mettre un masque ?

1



Se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

2

Face blanche intérieur



Face couleur extérieur



Sortir le masque en le prenant par les élastiques. Le placer dans le bon sens.

3



Placer les élastiques autour des oreilles. Ne pas toucher la partie centrale.

4



Appuyer sur la partie haut, au niveau du nez. Ce qui permet de le rendre hermétique.

5



Attraper votre bas du masque avec votre main propre puis le tirer pour couvrir le menton.

6



Votre masque est maintenant bien installé pour une durée maximale de 4 heures sans le toucher.

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les mains. Chaque fois que le masque est touché, l'utilisateur doit se laver les mains au savon ou avec du gel hydroalcoolique.

# Comment enlever un masque ?

1



Se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

2



Retirer le masque par les élastiques  
Ne jamais toucher la partie centrale du masque

3



Mettre le masque dans un sac en plastique refermable. Puis fermer le sac.

4



Se laver les mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique.

5



Nettoyer l'extérieur du contenant spécifique avec un produit nettoyant.

6



Jeter le sac plastique dans un poubelle fermée avec une commande au pied.