

Tensocold® Pack poche de froid

Référence 02544



Prix du produit :

3,89 € taxe inclu

Description brève du produit :

Poche de froid instantané à usage unique

Permet de soulager rapidement la douleur. Lire attentivement le mode d'emploi.

Description du produit :

Poche de froid instantanée à usage unique Tensocold Pack.

Indications :

Traumatologie sportive : traitement des lésions et des inflammations tendinomusculaires ou articulaires (tendinites, entorses, luxations, déchirures musculaires, claquages, elongations), Contusions-Hématomes, Hyperthermie (exemple fièvre), Insolation.

Caractéristiques

Poche à deux compartiments dont le mélange, après rupture, est générateur de froid par réaction endothermique extemporanée,

Le mélange d'urée et d'eau génère un froid instantané, sans stockage préalable au réfrigérateur,

Particulièrement adapté à vos activités sportives, sur votre lieu de travail, ou lors vos déplacements,

Maintien le froid durant environ 30mn.

Dimensions L 24 x l 14,5 cm

Composition

Poche extérieure (contenant des perles d'urée) Polyéthylène (PE) + Polyamide (PA)

Poche intérieure (contenant de l'eau) Polyéthylène téréphtalate (PET)

Mode d'emploi

- Frapper fortement l'extérieur de la poche pour provoquer l'éclatement de la membrane intérieure de la poche d'eau,
- Malaxer la poche pour mélanger le contenu et provoquer la réaction chimique de froid,
- Afin d'éviter tout risque de brûlures, placer un linge entre la peau et la poche de froid,
- Placer sur la zone à refroidir et, le cas échéant, fixer la poche à l'aide d'un bandage.

Précautions d'emploi

- USAGE EXTERNE UNIQUEMENT,
- Usage unique, jeter après utilisation,
- Utiliser uniquement si le produit est parfaitement scellé,
- Ne pas ingérer. En cas d'ingestion accidentelle, boire 1/2 litre d'eau chaude, ne pas provoquer de vomissement et consulter immédiatement un médecin,
- Eviter tout contact avec les yeux ou la peau. En cas de contact accidentel, rincer abondamment et immédiatement durant 15mn et consulter immédiatement un médecin,
- En cas d'insensibilisation de la peau (du fait de troubles dermatologiques ou de troubles circulatoires, n'utiliser ce dispositif médical que sous surveillance médicale,
- Ne pas appliquer directement sur les plaies,
- Ne pas percer ou ouvrir même après utilisation,
- Tenir hors de portée des enfants,
- Afin d'éviter tout risque de brûlures, placer un linge entre la peau et la poche de froid.