

# Set pour pose de suture

Référence 06943



## Prix du produit:

13,99 € taxe inclu

#### Description brève du produit :

Set pour pose de suture vendu le lot de 5

#### **Description du produit:**

Set de pose de suture.

#### Set stérile complet à usage unique pour pose de suture comprenant :

- 1 blister 15,5x19n5 cm 4 alvéoles
- Champ ouate/PE 45x45cm troué 6cm centré
- Champ cellulose/PE 30x48cm
- Compresse non tissé 7,5x7,5cm 4 plis 30g
- Tampon alcool 70%
- Pince inox adson 12cm sans griffe

Normes applicables: Directive 93/42/CEE et norme ISO 13485

#### Conditions de conservation du set de suture :

A conserver à température ambiante, à l'abri de l'humidité et de la lumière solaire, à l'abri de sources de chaleur.



### Comment utiliser le kit de suture ?

L'opérateur place dans les compartiments du blister la solution de savon antiseptique, la solution de rinçage et l'antiseptique. Il effectue la détersion, le rinçage, le séchage et l'antisepsie de la zone à suturer avec les compresses. Il installe le champ troué sur la plaie pour délimiter la zone stérile et l'autre champ à proximité de la zone de soin. Il utilise les tampons alcoolisés pour désinfecter l'opercule du flacon d'anesthésiant non fourni.

Avec la pince adson il rapproche les berges de la plaie pour faciliter la suture. Il utilise le porteaiguille pour la préhension de l'aiguille et du fil (non fournis).

À la fin du geste, il coupe l'extrémité du fil avec les ciseaux.