

Jersey tubulaire

Référence 00259



Prix du produit :

13,50 € taxe inclu

Description brève du produit :

Protection de zones traumatisées et pour utilisation avec tous types de plâtres, attelles et bandages.

Le jersey tubulaire à côtes est dispositif médical permet de protéger la peau sous un plâtre, une attelle ou un bandage. Il peut-être utilisé en maintien de pansements pour protéger et préserver une zone de chocs ou des parties traumatiques.

Grace à son excellente élasticité, ce jersey apporte une forte sensation de confort en épousant au plus près les contours anatomiques du corps. Il est fabriqué à partir de coton beige source d'extrême douceur et évite les problèmes de macération dus à la transpiration grâce à sa texture micro-aérée. Il bénéficie aussi de propriétés hydrofuges qui vous garantissent une meilleure imperméabilité.

Description du produit :

Jersey cote tubulaire non stérile

Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Simple d'utilisation, il est facile à dérouler à enfiler sur la zone à protéger grace à sa maille

tubulaire extensible et élastique. Une fois positionner, assurez-vous que le bandage n'est pas trop serré en appuyant de manière prolongée sur l'extrémité du membre soigné, vérifiez que le remplissage capillaire s'effectue normalement et que la peau ne reste pas blanche.

Tricot tubulaire à mailles fines. 100 % coton non blanchi. Doux pour la peau, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement. Il peut être coupé sans s'effiloche avec un ciseau.

Tricot tubulaire côte 2 x 2.

Elasticité permettant de mouler parfaitement les parties du corps à protéger sans faire de plis. Extension minimum en largeur : 300%.

Poids : 187 g/m² (± 10%).

Conforme au LPPR.

Jersey stérilisable à la vapeur, à l'oxyde d'éthylène et par irradiation.

Coloris : écru

Longueur : 25m

Précautions d'emploi de la bande Jersey cote :

Ne pas utiliser sur une peau lésée.

En cas de stérilisation à la vapeur, tenir compte d'un retrait sur la longueur d'environ 20% pour le jersey coton et 7% pour le jersey polyester.

Conditions de stockage :

Dans leur emballage d'origine, à l'abri de la chaleur, de la lumière et de l'humidité.

Produits complémentaires:

- [Attelle carton pour pied et cheville à usage unique pour adultes HEXOR](#)
- [Résine rigide d'immobilisation 3M™ Scotchcast™ Plus 5 cm x 3,6 m](#)