

Surfa'Safe Premium Anios mousse diffuse désinfectante 750 ml

Référence 03399



Prix du produit :

6,79 € taxe inclu

Description brève du produit :

Respect de l'environnement, de l'utilisateur et du matériel

Description du produit :

Pour la désinfection des surfaces hautes et des dispositifs médicaux non immergeables, le pulvérisateur moussant Surfa'Safe Premium Anios est un concentré d'efficacité détergente et antimicrobienne prouvée dès 3 minutes !

Le spray moussant **Surfa'Safe Premium Anios** est un détergent désinfectant nouvelle génération, combinant l'ammonium quaternaire et un tensio-actif non ionique.

Cette performance désinfectante brevetée (sans alcool et sans parfum) est **compatible avec un large panel de matériaux**. L'agent moussant est non corrosif vis-à-vis des inox et des polymères. Le séchage de la mousse est rapide et ne laisse pas de trace.

Produit réservé aux professionnels

| | |
|-----------------------------|---|
| INDICATIONS* | Solution détergente désinfectante, destinée au nettoyage et à la désinfection des surfaces. |
| COMPOSITION | Désinfectants (Chlorure de didécyldiméthylammonium – N° CAS 7173-51-5 -1.4 mg/g, Chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide – N° CAS 27083-27-8 - 0.96 mg/g) |
| PROPRIETES * | <p>Solution prête à l'emploi.</p> <p>Bactéricide (EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14561).</p> <p>Levuricide et fongicide (EN 1275, EN 13624, EN 13697, EN 14562).</p> <p>Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Herpesvirus, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccina virus, Polyomavirus SV40 et sur Norovirus.</p> |
| MODE D'EMPLOI | S'utilise sans dilution. Appliquer la solution détergente désinfectante sur un non-tissé propre et sec. Bien répartir le produit sur la surface à traiter (+/- 6 ml/m ² soit environ 10 pulvérisations). Respecter le temps de contact indiqué pour l'activité antimicrobienne recherchée. Ne pas rincer sauf en cas de contact prolongé de la surface avec la peau. Répéter l'application chaque fois que nécessaire ou se référer au plan d'hygiène en place. |
| PRECAUTIONS D'EMPLOI | Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Eviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Porter des gants appropriés. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Si besoin, contacter le centre antipoison. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas réutiliser l'emballage. Ne se débarrasser de ce produit et de son récipient qu'en prenant toutes précautions d'usage. Stocker entre |

+5°C et +35°C.

* Dangereux - respectez les précautions. Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces en contact ou non avec les denrées alimentaires et dispositif médical de Classe IIa. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.