

Gaines de stérilisation Rouleau de 200 m

Référence 02369



Prix du produit :

10,70 € taxe inclu

Description brève du produit :

Gaines pour la stérilisation de vos instruments médicaux en autoclave permettant de conserver la stérilité des instruments à la sortie du stérilisateur.

Description du produit :

Gaine de stérilisation pour [matériel médical](#) en autoclave

Les gaines de stérilisation sont destinés à emballer les [instruments médico-chirurgicaux](#) pour leur stérilisation en autoclave à vapeur d'eau ou à l'oxyde d'éthylène, afin de pouvoir conserver la stérilité de ces instruments à la sortie du stérilisateur.

Elles se présentent sous la forme de gaines en rouleaux de 200 m, de différentes largeurs, plates, à souder.

Les gaines servent à constituer des sachets à la taille désirée.

Une fois les instruments introduits, les sachets doivent être fermés par soudure à chaud grâce à l'utilisation d'une thermo-soudeuse.

Elles sont constituées d'une face papier de qualité médicale (60g/m² au minimum) et d'une face plastique en polyester/polypropylène (60g/m² au minimum) qui comportent 2 indicateurs de passage à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène, changeant de couleur après la stérilisation.

Témoin de stérilisation intégré

Les sachets sont conformes aux normes EN [11607 - 1](#) et 2, EN868-3, EN868-5

Informations et dimensions :

• Film plastique :

Caractéristiques (conditions : 23°C, 50% d'humidité) <i>/ Characteristics (conditions: 23°C, 50% humidity)</i>	Méthode / Method	Unité / Unit	Résultat / Result
Matériau <i>/ Material</i>	ASTM D-374	g/m2	52
Épaisseur <i>/ Thickness</i>		µm	50
Résistance au déchirement / <i>Tear strength MD</i>	ASTM D-882	N/15 mm	40
Résistance au déchirement / <i>Tear strength CD</i>	ASTM D-882	N/15 mm	40
Elongation / <i>Elongation MD</i>	ASTM D-882	%	60
Elongation / <i>Elongation CD</i>	ASTM D-882	%	60
Résistance à la température <i>/ Temperature resistance</i>	140°C		

• Papier médical :

Caractéristiques (conditions : 23°C, 50% d'humidité) <i>/ Characteristics (conditions: 23°C, 50% humidity)</i>	Méthode / Method	Unité / Unit	Résultat / Result	Min/Max
Grammage du matériau <i>/ Material weight</i>	BS ISO 536	g/m2	60	66/73
Résistance à la traction / <i>Tensile strength MD</i>	BS 4415	N/15 mm	80	70/..
Résistance à la traction / <i>Tensile strength CD</i>	BS 4415	N/15 mm	40	35/..
Résistance à la traction du produit humide / <i>Wet tensile strength MD</i>	BS 2922 part 2	N/15 mm	25	13,5/..
Résistance à la traction du produit humide / <i>Wet tensile strength MD</i>	BS 2922 part 2	N/15 mm	25	6,75/..

Stérilisation et conditions de changement de couleur :

Stérilisation vapeur / Steam sterilization

Condition	Minimum Duration	Temperature
Saturated steam	10 min +/- 5 s	121°C (+3/0 °C)
Saturated steam	2 min +/- 5 s	134°C (+3/0 °C)

Stérilisation à l'oxyde d'éthylène / EO sterilization

Condition	Minimum Duration	Temperature	Relative Humidity
600mg/l EO +/- 30mg/l	30 min +/- 15 s	30°C +/- 1°C	60% +/-10%
600mg/l EO +/- 30mg/l	20 min +/- 15 s	54°C +/- 1°C	60% +/-10%

À quoi servent les gaines de stérilisation ?

Les sacs et gaines de stérilisation sont utilisés pour emballer les instruments qui doivent être désinfectés dans un autoclave à vapeur ou à oxyde d'éthylène.

Nous proposons des gaines de stérilisation conformes aux normes en vigueur

Composées d'une face papier perméable à la vapeur et à l'air et d'une face transparente en polypropylène. Comme les sacs de stérilisation, elles offrent une grande résistance et une thermosoudure parfaite. Les instruments restent ainsi stériles pendant plusieurs mois. Stockez-les dans un endroit propre et sec, à l'abri des sources de chaleur.

Produits complémentaires:

- [Stérilisateur à air sec Poupinel](#)
- [Stérilisateur Poupinel 6 litres Tau portable](#)
- [Stérilisateur Poupinel 1,5 L Tau Steril Mini Automatic](#)