

Dynamomètre de Collin adulte

Référence 01716



Prix du produit :

135,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour mesurer la pression et la traction musculaire

Description du produit :

Dynamomètre de Collin adulte en inox ASI.

Marquage CE.

Dimensions : 70 x 130 mm

Épaisseur : 12 mm

Poids : 95 g

Pression maxi : 70 kg

Traction maxi : 200 kg

Graduation traction : par 5 kg

Graduation pression : par 1 kg

Mode d'emploi du dynamomètre :

Pour la pression : Prendre le dynamomètre dans la main et presser fortement en fermant les doigts sur l'instrument. L'aiguille de pression se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de pression intérieure exprimée en kilo de 0 à 70 kg.

Pour la traction : Vous devez vous munir préalablement d'une chaîne de traction que vous accrocherez à l'une des extrémités de l'instrument. Puis vous tirez sur la chaîne pour calculer la traction, l'aiguille se déplacera en actionnant le curseur au maximum réalisé. La lecture se fait sur l'échelle de traction extérieure exprimée en kilo de 0 à 200 kg.