


Test d'acuité visuelle de Landolt à 5 mètres

Référence 03092

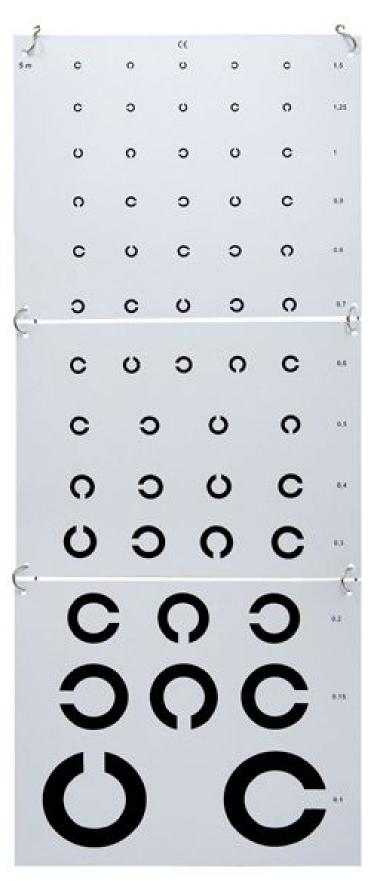

Prix du produit :

21,99 € taxe inclu



Description brève du produit :

Le **test de Landolt** teste la vision de loin en lecture directe à 5 mètres de distance. Chaque ligne du test représente 1/10 d'acuité visuelle, ce qui permet de quantifier l'acuité visuelle du patient.

Description du produit:

Test d'acuité visuelle dit de Landolt à 5 mètres, composé de 3 plaques en PVC blanc et chaînette de suspension avec impression noire.

Caractéristiques:

• Plaque en PVC blanc 1000 g/m2, chaîne et anneaux en acier.

• Dimensions: 250 x 215 mm

• Épaisseur : 1,2 mm

Poids: 145 gImpression: noir

• Dispositif permettant d'établir un bilan visuel, n'a pas une fonction de mesurage suivant la définition de mesurage de la Directive 93/42.

Mode d'emploi :

- Sortez l'échelle de son emballage (sachet), la déplier avec précaution pour ne pas rayer les plaques. Accrocher l'échelle au mur par l'intermédiaire de la chaîne à environ une hauteur de 180 cm. Le sujet doit se tenir à une distance égale à D indiqué sur l'échelle (soit 5 mètres). Tester auparavant la vision en mode binoculaire puis procéder successivement par oeil en masquant l'oeil non testé par un objet opaque.
- Ne peut être utilisé que par des professionnels ayant reçus une formation spécifique.
- Éviter tout éclairage pouvant altérer la vision normal du test. Vérifier que l'échelle soit bien à plat sur le mur, sans angle. Bien prendre soin de l'impression graphique, éviter les rayures ou les effacages.
- En cas d'altération du lettrage changer de produit.

CE.