

Test d'acuité visuelle d'Armaignac à 5 mètres

Référence 05084



Prix du produit :

19,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'échelle optométrique d'Armaignac 5M est une échelle optométrique murale permettant aux personnes illettrées de réaliser un test d'acuité visuelle par lecture directe à 5 mètres.

Description du produit :

Test d'acuité visuelle dit d'Armaignac à 5 mètres, composé de 3 plaques en PVC blanc et chaînette de suspension avec impression noire.

Caractéristiques :

- Plaque en PVC blanc 1000 g/m², chaîne et anneaux en acier.
- Dimensions : 250 x 200 mm
- Épaisseur : 1,5 mm
- Poids : 145 g
- Impression : noir
- Dispositif permettant d'établir un bilan visuel, n'a pas une fonction de mesurage suivant la définition de mesurage de la Directive 93/42.

Mode d'emploi :

- Sortez l'échelle de son emballage (sachet), la déplier avec précaution pour ne pas rayer les plaques. Accrocher l'échelle au mur par l'intermédiaire de la chaîne à environ une hauteur de 180 cm. Le sujet doit se tenir à une distance égale à D indiqué sur l'échelle (soit 5 mètres). Tester auparavant la vision en mode binoculaire puis procéder successivement par oeil en masquant l'oeil non testé par un objet opaque.
- Ne peut être utilisé que par des professionnels ayant reçus une formation spécifique.
- Éviter tout éclairage pouvant altérer la vision normal du test. Vérifier que l'échelle soit bien à plat sur le mur, sans angle. Bien prendre soin de l'impression graphique, éviter les rayures ou les effacages.
- En cas d'altération du lettrage changer de produit.

CE.