


Lingettes désinfectantes Anios Quick Wipes

Référence 05068

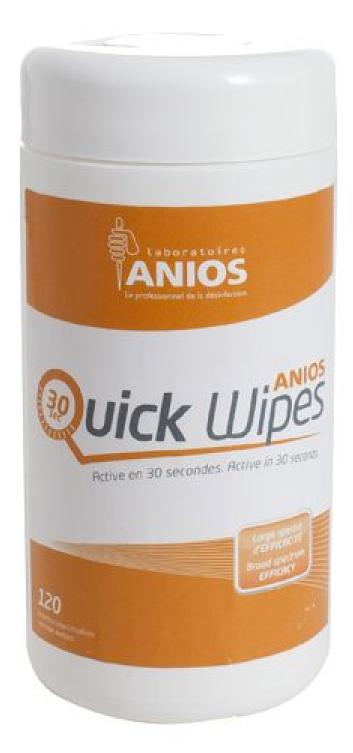

Prix du produit :

6,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Lingettes avec solution désinfectante pour une action rapide sur les microbes et les bactéries. Idéales pour nettoyer vos instruments de diagnostique et dispositifs médicaux non immergeables comme les stéthoscopes, les otoscopes, les sondes... Large spectre d'activité.

Description du produit :

Lingettes désinfectantes pour les dispositifs médicaux non immergeables



Idéales pour le nettoyage et la désinfection des dispositifs médicaux non immergeables comme les <u>stéthoscopes</u>, les <u>otoscopes</u>, les sondes échographiques, les <u>capteurs ecg</u>, <u>tensiomètres</u>, <u>marteau réflexes</u> etc.

Les lingettes Anios Quick Wipes** sont imprégnées d'une solution désinfectante à action rapide pour les surfaces et les dispositifs médicaux non immergeables et non invasifs, préalablement nettoyés et résistants à l'alcool. Sans rinçage. Sur base éthanol. Large spectre d'activité en temps court. Formulation sans aldéhyde, sans colorant. Parfum : thé citron.

Boite de 120

Composition

Solution d'imprégnation: Ethanol (55%), Propionate d'ammonium quaternaire, parfum.

Caractéristiques :

Composition: cellulose, viscose, liant acrylique (spunlace 23gr/m²)

Taille de la lingette : 130 x 190 mm

Solution d'imprégnation : 1,9ml d'ANIOSPRAY QUICK par lingette

Propriétés microbiologiques des lingettes :

Efficacité antimicrobienne garantie selon les méthodes en vigueur :

- Activité de la solution d'imprégnation (1)
- Activité de la lingette selon EN 16615 (2)
- Activité de la solution de désorption (3)



Active sur	Normes	Temps de contact
Bactéries (1) (2)	EN 13727 ⁽³⁾ , EN 16615, EN 13697 Acinetobacter baumannii BLSE et Staphylococcus aureus SARM selon EN 13697	30 secondes
Mycobactéries (1)	Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563	30 secondes
	Mycobacterium avium : EN 14348, EN 14563	5 minutes
Levures (1)(2)	Candida albicans : EN 13624 ⁽³⁾ , EN 13697, EN 16615	30 secondes
Moisissures (1)	Tricophyton mentagrophytes selon EN 14562	30 secondes
	Aspergillus brasiliensis : EN 13624, EN 13697	5 minutes
Virus (1)	Adenovirus, HIV-1, PRV (virus modèle HBV), BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus*, Herpesvirus, Coronavirus, Rotavirus, Influenza virus A (H ₁ N ₁)	30 secondes
	Norovirus MNV, Calicivirus Felin	5 minutes

Précautions d'emploi

Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Etablies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Stockage entre +5°C et +25°C.

Dispositif médical de classe IIa (Diective 93/42/CEE modifiée).

Utiliser dans les 3 mois après ouverture.

Mode d'emploi de la lingette Anios Quick Wipes

^{*} RKI: Le Robert Koch Institute recommande l'utilisation de désinfectants avec la revendication "begrenzt viruzid wirksan", soit activité virucide limitée, pour interrompre la chaîne de transmission. Selon cet Institut, l'activité virucide limitée correspond à une activité sur virus de la vaccine et BVDV.





Prendre une lingette





S'utilise sur les dispositifs médicaux préalablement nettoyés. Appliquer sur l'ensemble de la zone à traiter en utilisant autant de lingettes que nécessaire. Laisser agir 30 secondes au minimum. Procéder à un rinçage abondant à l'eau de réseau des zones traitées destinées à entrer en contact avec la peau.