

Aniosyme X3 Anios Désinfectant - L'unité

Référence 05934



Prix du produit :

18,59 € taxe inclu

Description brève du produit :

Produits désinfectant Anios XL3 recommandé pour le nettoyage et la pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgical, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.

Description du produit :

Aniosyme XL3 Anios bidon de 5 L.

Indications:

- - Nettoyage renforcé et pré-désinfection de l'instrumentation médico-chirurgicale, des dispositifs médicaux et du matériel endoscopique.
- - Nettoyage en bacs à ultra-sons. Ramassage de l'instrumentation souillée.

Composition:



Propionate d'ammonium quaternaire, Digluconate de chlorhexidine, tensioactifs non ioniques, complexe enzymatique (protéase, lipase et amylase), parfum, colorant, excipients.

Propriétés microbiologiques :

- Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 14561, BMR selon EN 13727 : 5 min à 0,5%
- - Levures: EN 1275, EN 13624, EN 14562: 5 min à 0.5%
- - Virus : Selon EN 14476 : actif sur HIV-1, PRV (virus modèle HBV),
- - Herpesvirus, BVDV (virus modèle HCV), Vaccinia virus : En 5mn à 0,5%.

Mode d'emploi:

- - Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.
- - Immerger complètement le dispositif médical dans le désinfectant Anios XL3.
- - Temps de trempage conseillé : 5 min.
- - Brosser si nécessaire.
- - Pour le matériel endoscopique : Double nettoyage 10 + 5 minutes, Ecouvillonner
- - Rincer soigneusement le dispositif médical à l'eau de réseau (de bonne qualité microbiologique).
- - Pour le matériel endoscopique : l'extérieur et l'intérieur du dispositif médical.
- Essuyer avec un champ propre. Passer à l'étape suivante (voir protocole interne à l'établissement).
- - Dangereux respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Accessoires complémentaires :

Réf. 04836 - Pompe 25 ml pour bidons de 5 litres

^{*} Attention, produit dangereux - respectez les précautions d'emploi. Dispositif médical classe IIb - Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.