

Cidalkan détergent désinfectant - Spray de 1L

Référence 05939



Prix du produit :

14,54 € taxe inclu

Description brève du produit :

Pour le nettoyage et la désinfection des surfaces, équipements et dispositifs médicaux non immergeables.

Usage par essuyage humide sur les surfaces (paillasse, charriots, mobilier), les équipements (moniteurs) et les dispositifs médicaux non immergeables, invasifs et non invasifs (sondes d'échographie, sondes endocavitaires et endoscopes gainés, générateurs d'hémodialyse, unit dentaire).

Description du produit :

Flacon pulvérisateur détergent et désinfectant Cidalkan

Large spectre d'activité en seulement 5 minutes.

Base alcoolique pour un séchage rapide. Idéal entre deux patients.

Actif sur les spores de Clostridium difficile et sur le coronavirus.

Compatibilité avec les sondes d'échographie, testeurs de glycémie ...

Parfum pamplemousse agréable adapté au milieu médical.

Formule contact alimentaire.

Mode d'emploi flacon pulvérisateur prêt à l'emploi :

1. Pré-imprégner un non-tissé propre avec la solution.
2. Nettoyer minutieusement la surface.
3. Laisser agir le produit 5 minutes (15 min. pour pour les spores de Clostridium difficiles). Ne pas rincer (sauf pour les surfaces avec contact alimentaire).
4. Changer de support non-tissé pour chaque équipement.

Spectre d'activité :

Bactéricide (EN 13727, EN 14561, EN 1276, EN 13697, EN 16615).

Levuricide (EN 13624, EN 14562, EN 1650, EN 13697, EN 16615) ;

Fongicide (EN 14562, EN 1650, EN 13697) ;

Actif selon EN 14476 sur Rotavirus, Norovirus, Adénovirus, virus de l'Hépatite B, virus de l'Hépatite C, VIH, Influenza A/H1N1, Herpès virus.

Actif selon EN 13704 sur Clostridium difficile en 15mn.

DM Classe IIb et biocide TP2/TP4.

Précautions d'emploi :

Utiliser les produit biocide avec précaution. Avant toute utilisation lire l'étiquette et les informations concernant le produit