

Désodorisant désinfectant air et surfaces à la menthe - 750 ml

Référence 05492

Prix du produit :

5,99 € taxe inclu





Description brève du produit :



Description du produit:

Désodorisant et désinfectant Techline à la menthe air et surfaces utilisé pour la désinfection des surfaces et l'assainissement de l'air dans les locaux.

Spécialement conçu pour la <u>désinfection en milieu hospitalier</u>, il convient aux chambres de malades, salles de bain, toilettes, couloirs et lieux accueillant le public...

Il peut être utilisé dans les cliniques, les écoles, maisons de retraite, les chambres d'hôtels, les crèches, les bureaux, les ambulances, lieux publics....

Assure la **désinfection totale des surfaces**, sanitaires, sièges de WC, salles d'attente, lits d'examen et l'assainissement aérien des locaux.

Caractéristiques :

Aspect : aérosolCouleur : IncoloreOdeur : Note menthe

- Solubilité dans l'eau : insoluble

Composition:

Gaz propulseur : butane, alcool, mélange d'ammonium Quaternaire.

Normes:

Bactéricide: EN 1276 en 5 mn à 20° C sur Staphilococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Enterococcus hirae en condition de saleté.

Fongicide : EN 1650 en 15 mn à 20° C sur Aspergillus Niger, Candida albicans en condition de propreté.

Conforme à la norme NF T72-150.

Mode d'emploi :

Désinfection des surfaces : vaporiser uniformément à 20 cm et laisser sécher, sans essuyer. **Assainissement de l'air dans les locaux** : vaporiser aux 4 coins de la pièce pendant 10 secondes pour un volume de 50 m³.

Précautions d'utilisation :

Extrêmement inflammable. Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles, ne pas fumer. Conserver hors de portée des enfants. Ne pas respirer les aérosols.

Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Récipient sous pression. À protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50° C. Ne pas percer ou brûler après usage.

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel le produit est destiné. Ne pas pulvériser de façon prolongée.



Aérosol de 750 ml.