

Tegaderm Film 3M

Référence 06260



Prix du produit :

13,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les pansements 3M™ Tegaderm™ Film sont des pansements semi-perméables : étanches à l'eau, aux bactéries et aux virus tout en laissant respirer la peau.

Description du produit :

[Pansements](#) 3M™ Tegaderm™ : qualité, simplicité, sécurité

Avantages

- Simplicité du cadre de pose : permet une pose précise et aseptique du pansement de maintien de cathéters
- Confort pour le patient : pansements à la pose et au retrait faciles
- Performance de l'adhésif : adhésivité croissante dans le temps qui permet un maintien adapté
- Adhésif hypoallergénique, sans collophane ni latex

- Transparence : pour une surveillance en continu du site de ponction

Description

Les pansements 3M™ Tegaderm™ Film sont indiqués pour le maintien de [cathéters](#) (tels que CVC et CVP) ainsi que pour les plaies chirurgicales suturées propres et non exsudatives et le recouvrement de pansement.

Boîte de 10

Comment poser un pansement TEGADERM ?

[Extrait de la notice Tegaderm 3M]

Les pansements Tegaderm sont très faciles à utiliser, veuillez simplement suivre ces 4 étapes.

- 1 - Ouvrir l'emballage de protection du pansement stérile et retirer le support en papier imprimé.
- 2 - En saisissant les ailettes, centrer le pansement sur la zone de la plaie à traiter. Lissez doucement le pansement à partir du centre et vers les bords.
- 3 - Retirer le cadre d'application du pansement et lissez les bords.
- 4 - Norez éventuellement la date de la pose du pansement de l'étiquette. Détachez l'étiquette du cadre pour l'appliquer près de la zone pansée.

Quand et comment retirer un pansement Tegaderm ?

Les **pansements transparents 3M Tegaderm** doivent être retiré lorsque des raisons médicales le justifient ou lorsque le pansement ne remplit pus son rôle.

Des changements trop fréquent peuvent affecter la peau et perturber la cicatrisation.

- 1 - Tirer le pansement par un coin en tenant la peau de l'autre main. Étirez et relâchez successivement le pansement jusqu' ce qu'il soit entièrement décollé.
- 2 - Si tous les coins du pansement adhèrent fortement à la peau, placez u bout de sparadrap sur l'un des coins et frottez vigoureusement. Cette bande servira d'amorce pour décoller le pansement.

Vidéo : comment poser et retirer un pansement TEGADERM ?

Tout savoir sur les pansements TEGADERM :

Tegaderm : le pansement transparent qui protège et guérit

Tegaderm est un pansement transparent, imperméable et respirant qui est utilisé pour protéger les plaies et les incisions chirurgicales. Il est également utilisé pour maintenir les cathéters et les drains en place. Il est fabriqué à partir d'un film transparent et souple qui permet à la peau de respirer et de cicatriser. Il est également résistant à l'eau et aux bactéries, ce qui le rend idéal pour protéger les plaies de l'infection.

Tegaderm est disponible en différentes tailles et formes pour s'adapter à une multitude de plaies. Il est également disponible avec ou sans adhésif. Les pansements Tegaderm sans adhésif sont idéaux pour les plaies sensibles ou pour les personnes qui ont des allergies à l'adhésif.

Tegaderm est un pansement facile à appliquer et à retirer. Il peut être laissé en place jusqu'à sept jours, ce qui réduit le nombre de changements de pansement nécessaires. Tegaderm est également hypoallergénique et non irritant, ce qui le rend sûr pour une utilisation sur tous les types de peau.

Tegaderm est un pansement efficace qui peut aider à protéger les plaies, à favoriser la cicatrisation et à prévenir les infections. Il est un choix populaire pour les professionnels de la santé et les patients, et il est disponible dans la plupart des pharmacies.

Les avantages de l'utilisation de Tegaderm :

- Protège les plaies de l'infection
- Favorise la cicatrisation
- Permet à la peau de respirer
- Résistant à l'eau
- Hypoallergénique
- Non irritant
- Facile à appliquer et à retirer
- Peut être laissé en place jusqu'à sept jours

Si vous avez une plaie ou une incision chirurgicale, parlez à votre médecin de l'utilisation de Tegaderm, ce pansement peut vous aider à protéger votre plaie, à favoriser la cicatrisation et à prévenir les infections.

Comment utiliser votre pansement TEGADERM ?

1. Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon.

2. Sélectionner un pansement de la taille appropriée pour la plaie.
3. Enlever le film protecteur du pansement.
4. Placer le pansement sur la plaie, en veillant à ce que la zone adhésive soit en contact direct avec la peau.
5. Appuyer doucement sur le centre du pansement pour éliminer les bulles d'air.
6. Le pansement peut être laissé en place jusqu'à 7 jours.
7. Si le pansement est mouillé, il peut être laissé en place. Cependant, si le pansement est souillé ou détérioré, il doit être remplacé.
8. Pour retirer le pansement, lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon. Soulevez doucement le bord du pansement et tirez-le doucement vers l'extérieur. Si le pansement colle à la peau, appliquez un peu d'huile minérale ou de vaseline sur la peau pour aider à le décoller.

Voici quelques conseils pour utiliser un pansement Tegaderm :

- Éviter d'utiliser ce type de pansement sur une plaie qui saigne ou qui est infectée.
- Si la plaie est suintante, utilisez un pansement Tegaderm avec une couche absorbante.
- Si vous avez des allergies à l'adhésif, utilisez un pansement Tegaderm sans adhésif.
- Pour toutes autres questions vous pouvez demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin traitant.

Pour en savoir + :

[Pour plus d'informationS sur les pansements 3M Tegaderm rendez-vous sur le site de 3M](#)