

# Suture cutanée adhésive Steri-Strip™ 3M™ pansement cicatrisant

Référence 00224



Prix du produit :

**33,59 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Stéri StripSutures™**, pansements strip type sutures cutanées adhésives stériles et hypoallergénique. Faciles à mettre en place, ces strips permettent une cicatrisation rapide. Ils sont très solides grâce au procédé 3M : fibres de polyester qui accroît la résistance du pansement en milieu humide. **Disponibles en 5 tailles !**

Description du produit :

**La suture 3M™ Steri-Strip™ permet une cicatrisation rapide et propre des plaies cutanées.**

**C'est un pansement de [soins](#) incontournable pour la réparation des incisions ou lacérations depuis 50 ans.**

Technique beaucoup moins intrusive et invasive que les sutures à l'aiguille et au fil, le Steri-Strip™ est un pansement de suture efficace sur les coupures ou les incisions chirurgicales. Pouvant venir en renfort sur des agrafes ou après ablation de fils, il confronte les berges de la plaie de manière uniforme pour une cicatrisation esthétique.

Facile à appliquer, sans matériel particulier requis, la pose des bandelettes se fait en biais ou de manière croisée, très simplement !

Indications : plaies superficielles, renforcement après le retrait d'agrafes ou de sutures post opératoires...

## Les pansements Stéri-Strips, résistants aux milieux humides

Présentés sous pochette stérile, les Steri-Strip présentent des risques d'infection minimales. Mais aussi, très solides, grâce à leur renfort en fibre de polyester (exclusivité 3M) et leur résistance en milieu humide, les sutures sont durables. Le support microporeux évite toute macération pour une lésion encore plus propre et une cicatrisation plus rapide.

Respectueuses des surfaces cutanées avec un adhésif hypoallergénique et un retrait indolore, la peau est préservée et des traumatismes supplémentaires sont évités.

*L'efficacité des Steri-Strip, depuis 50 ans, est prouvée grâce à plus de 100 études.*

Conditionnement par pochette stérile de plusieurs sutures.

Disponible en 5 tailles suivant vos besoins et la surface de la plaie à cicatriser :

3 mm x 75 mm (violet) - pochette de 5 sutures

6 mm x 38 mm (vert)- pochette de 6 sutures

6 mm x 75 mm (rouge) - pochette de 3 sutures

6 mm x 100 mm (orange) - pochette de 10 sutures

12 mm x 100 mm (bleu) - pochette de 6 sutures

**Chaque boîte contient 50 sutures de 6 cm.**

**Certifiées CE.**

Les Steri-Strip sont des dispositifs médicaux (DM) de Classe Is selon la Directive 93/42 destinée au soin des plaies. Marquage CE0086. Lire attentivement les informations sur la notice ou l'étiquetage avant toute utilisation.

*3M et Steri-Strip sont des marques déposées 3M. [Pour plus d'informations sur les stéri strips suivez ce lien.](#)*

*Consultez également notre gamme de [pansements](#) et [bandages pour les soins](#).*

## Précautions d'emploi pour les pansements Stéri-Strip

Il ne faut utiliser ce types de sutures adhésives si votre plaie est infectée. En cas de doute il vous faut être conseillé par votre médecin traitant.

Les pansements strips sont à usage unique, si le strip se décolle ou est souillé, jetez-le et remplacez le par un nouveau.

Lire attentivement la notice fournie dans la boîte.

## [BON À SAVOIR]

### Qu'est-ce qu'un pansement Steri-Strip ?

Les Steri-Strips sont des bandes adhésives non tissées en nylon ou en polyester, munies d'un adhésif hypoallergénique. Ces pansements sont souvent utilisés pour fermer des plaies superficielles ou des incisions chirurgicales qui ne nécessitent pas de sutures traditionnelles. Ils sont disponibles en différentes tailles pour s'adapter aux divers besoins.

#### Avantages des pansements stéri-strip :

1. Fermeture efficace des plaies : les Steri-Strips sont conçus pour maintenir les bords de la plaie bien fermés, favorisant ainsi une cicatrisation rapide et propre. Ils permettent aux tissus de se régénérer naturellement sans nécessiter de points de suture.
2. Réduction des cicatrices : en maintenant les bords de la plaie alignés, ces pansements réduisent le risque de cicatrices visibles. Ils favorisent la formation d'une cicatrice fine et moins apparente.
3. Facilité d'utilisation : simples à appliquer et ne nécessitant pas de compétences particulières. Ils sont une option pratique pour les situations où une intervention médicale immédiate n'est pas disponible.
4. Confort et flexibilité : ces pansements sont conçus pour offrir un certain degré de flexibilité et d'extensibilité, ce qui permet une certaine mobilité et un confort accru pour le patient.

### Comment poser un stéri-strip ?

Pour poser un Steri-Strip, suivez ces étapes :

1. Préparez la zone : assurez-vous que la peau est propre et sèche autour de la plaie que vous souhaitez fermer. Nettoyez la zone avec de l'eau et du savon doux, puis séchez délicatement.
2. Alignez les bords de la plaie : rapprochez les bords de la plaie aussi près que possible l'un de l'autre. Vous pouvez utiliser des [pincés stériles](#) pour maintenir la plaie fermée pendant la pose des Steri-Strips.
3. Ouvrez l'emballage : retirez un Steri-Strip de son emballage en veillant à ne pas toucher la partie adhésive avec vos doigts pour éviter toute contamination.
4. Appliquez les Steri-Strips : placez le premier Steri-Strip perpendiculairement à la plaie, en

le positionnant de manière à ce qu'il traverse les deux côtés de la plaie et maintienne les bords ensemble. Appliquez une légère tension sur le pansement tout en le collant à la peau. Ajoutez d'autres Steri-Strips en les espaçant régulièrement le long de la plaie, en veillant à ce qu'ils se chevauchent légèrement. Cela aidera à répartir la tension sur toute la plaie.

5. Lissez la bandelette : à l'aide de vos doigts, appuyez doucement sur chaque Steri-Strip pour vous assurer qu'ils adhèrent bien à la peau. Assurez-vous qu'il n'y a pas de plis ou de bulles d'air en dessous.
6. Répétez si nécessaire : si la plaie est plus longue, vous devrez peut-être ajouter d'autres Steri-Strips en suivant les mêmes étapes jusqu'à ce que la plaie soit complètement fermée.

Il est important de noter que ce type de suture ne conviennent pas à toutes les plaies. Si la plaie est profonde, ou si vous pensez qu'elle nécessite des points de suture, il est préférable de consulter un professionnel de la santé pour obtenir un traitement approprié.

## **Indications des pansements Steri-Strip :**

Les Steri-Strips sont couramment utilisés dans les situations suivantes :

1. Fermeture de plaies superficielles : les petites coupures, les abrasions ou les incisions peu profondes peuvent être fermées efficacement avec les Steri-Strips, évitant ainsi les sutures traditionnelles.
2. Maintien des sutures : parfois, ces pansements sont utilisés en complément des sutures pour renforcer la fermeture et éviter une tension excessive sur les fils.
3. Fermeture post-opératoire : après certaines procédures chirurgicales mineures, ils peuvent être utilisés pour fermer les incisions et favoriser une guérison rapide.

## **Peux-t-on poser directement les stéri strip sur la plaie ?**

Oui, ces pansements sont conçus spécialement pour pouvoir être apposé directement sur une plaie non infectée.

## **Pourquoi mettre des strips ?**

Les strips sont des pansements permettant la fermeture rapide et stérile des plaies peu profondes lors de lésions ou d'incisions chirurgicales.

## **Quand enlever les stéri strip ?**

Il est conseillé d'attendre 12 à 14 jours avant de retirer les pansements vous-même. Il est possible que les stéri-strip se décollent d'eux-mêmes, il sont alors prêt à être retirés.

## **Peut-on se servir des pansements stéri-strip pour faire tenir une compresse :**

Non, il faut pour cela utiliser un sparadrap adapté à la taille de la compresse. Le stéri strip est conçu pour être collé directement sur la peau.

## **LE SAVEZ-VOUS ?**

Vous pouvez commander sur notre site [vos blocs d'ordonnances sécurisées et certifiées AFNOR](#) pour la prescription de vos médicaments classés comme stupéfiants.