

# Test infections vaginales digital Exacto BioSynex

Référence 06612

**Prix du produit :**

**7,13 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Exacto infections vaginales permet de différencier mycose et vaginose. Facile d'utilisation : prélèvement vaginal par simple contact. Résultat immédiat et facile à interpréter.



**Description du produit :**

## **Un test pour déceler les infections vaginales et les mycoses.**

Près d'une femme sur 6 souffrira, au cours de sa vie, d'une infection vaginale bactérienne. Celle-ci se manifeste par des symptômes gênants comme des démangeaisons, brûlures, pertes abondantes, odeurs.

Les symptômes étant proches de ceux de la mycose, il y a souvent confusion sur les causes parmi les femmes.

## **Facile d'utilisation**

Prélèvement vaginal par simple contact

- Résultat facile à interpréter : 1 seul paramètre, code couleur simple
- Résultat immédiat

Avec les symptômes :

- si le pH est supérieur à 4.4, il s'agit d'une infection vaginale (en cas de grossesse, la rupture de la poche des eaux est également possible) à traiter après consultation médicale.
- si le pH est inférieur à 4.4, il s'agit d'une mycose, votre pharmacien peut vous proposer des traitements adéquats

Efficacité éprouvée :

- Permet d'orienter vers le bon traitement : antibiotique ou antifongique  
En cas de vaginose à répétition, permet un suivi entre deux visites médicales

**Boîte de 3 tests**

**CE.**



1 à 3 cm



Pressez contre la paroi environ 10 secondes.



Retirez prudemment l'applicateur et comparez la zone colorée à l'échelle de couleur imprimée sur la pochette.

VOTRE FOURNISSEUR DE MATÉRIEL MÉDICAL DEPUIS 1920

