


Coussin chaud/froid 4 en 1 CALORPAD réutilisable

Référence 06745

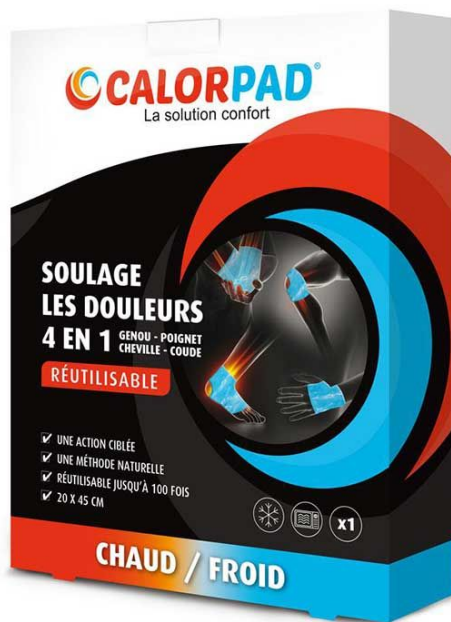

Prix du produit :

23,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Coussin réutilisable 4 en 1 pour soulager rapidement les douleurs dues aux coups et hématomes. Peut être utilisé en thermothérapie (chaud) ou cryothérapie (froid). La forme du coussin a été étudiée pour s'adapter au coude, au poignet, au genou ou à la cheville.

Description du produit :

Coussin chaud/froid 4 en 1 réutilisable CALORPAD

Pour un usage immédiat. À déposer sur les lombaires pour soulager les douleurs rhumatismales.

Le coussin CALORPAD 4 en 1 soulage rapidement la douleur par son action à chaud (thermothérapie) ou à froid (cryothérapie) et ce, naturellement (sans médicament).

Sa forme est spécialement conçue pour s'adapter aussi bien au **coude, au poignet, au genou qu'à la cheville**. 2 sangles velcro permettent de l'ajuster au mieux selon la morphologie de la personne. D'où son nom 4 en 1 : 1 coussin pour 4 usages

différents et aussi bien par le **froid** que par le **chaud**.

Dimensions : 20 x 45 cm.

Qu'est le ce que le coussin chauffant Calorpad

Appliqué chaud sur la zone douloureuse, il permet de diminuer les contractures musculaires par dilatation des vaisseaux sanguins et procure une sensation de confort immédiat. Le coussin CALORPAD 4 en 1 peut également être utilisé à froid pour réduire l'inflammation et limiter les oedèmes par exemple suite à un choc ou une entorse.

Le coussin CALORPAD 4 en 1 se décline en différents formats afin de s'adapter à toutes les zones douloureuses (dos, cervicales, genoux, coudes, poignets, chevilles, etc.)

Utilisation à froid (cryothérapie) : le coussin CALORPAD 4 en 1 soulagera vos douleurs mécaniques et/ou inflammatoires : entorses, luxations, élongations, déchirures, claquages, tendinites, coups et hématomes, contusions, etc.

Utilisation à chaud (thermothérapie) : le coussin CALORPAD 4 en 1 soulagera vos douleurs rhumatismales, contractures musculaires, etc.

Le coussin CALORPAD 4 en 1 est une solution économique pour satisfaire les besoins de toute la famille car il est réutilisable plus d'une centaine de fois.

Avant d'utiliser tout produit, il est préférable de consulter un professionnel de santé.




CALORPAD®
La solution confort

Mode d'emploi du coussin pour thermothérapie :

Utilisation à froid (cryothérapie) :

Placez le coussin sans les 2 sangles velcro pendant environ 2 heures au réfrigérateur ou pendant 20 minutes maximum au congélateur. Appliquez sur la zone douloureuse 20 minutes maximum.

Vous pouvez également conserver le coussin en permanence au réfrigérateur pour une utilisation immédiate. Ne pas conserver le coussin au congélateur.

Utilisation à chaud (thermothérapie) au four micro-ondes :

Placez le coussin sans les 2 sangles au centre du micro-ondes.

Réglez le micro-ondes à 600 watts, placez le coussin CALORPAD 4 en 1 en s'assurant qu'il ne touche pas aux parois du micro-ondes et chauffez pendant 10 secondes. Réchauffez le coussin par intervalles de 10 secondes, sans dépasser 60 secondes (1 minute). Sortez le coussin du micro-ondes et malaxez-le avec les mains afin de répartir la chaleur de façon homogène. Répétez l'opération jusqu'à obtenir la température souhaitée sans dépasser le temps de chauffe maxi.

Il est très important de bien respecter ce temps de chauffe (le temps donné ici concerne un coussin conservé à température ambiante).

Appliquez le coussin sur la zone douloureuse environ 20 à 30 minutes.

Composition du coussin :

Gel à base de glycérine, propylène-glycol, carboxyméthylcellulose, colorant et eau.

[Découvrez les autres pads pour la cryothérapie ou thermothérapie](#)