

Attelle carton pour pied et cheville à usage unique pour adultes HEXOR - L'unité

Référence 06830



Prix du produit :

33,65 € taxe inclu

Description brève du produit :

Attelle pied-cheville destiné à l'immobilisation thérapeutique du pied et de la cheville. Idéal pour les services d'urgence ou les interventions sur les accidents. Facile et rapide à mettre en place pour, cette attelle est conçu avec un matériau cellulosique recyclable. Côté logistique, l'attelle ne prend pas de place à stocker à plat. Elles se superposent. **Produit fabriqué en France.**

Description du produit :

Orthèse en carton à usage unique HEXOR : pour immobiliser le pied et la cheville.

Cette **attelle jetable** est fabriquée en carton traité, l'orthèse se pose simplement et rapidement. Elle est donc tout indiquée pour les interventions d'urgence mais peut aussi convenir pour remplacer les plâtres et les résines.

Livrée à plat, elle se met en place en quelques secondes. Il faut simplement la plier pour l'adapter au pied et à la jambe du patient. Il suffit ensuite de serrer l'attelle grâce aux bandes agrippantes.

La surveillance et le renouvellement des pansements et bandages sont alors facilités. Il est en effet facile de desserrer l'orthèse, faire les soins, puis resserrer les bandes.


Sans aucune partie métallique, l'attelle peut être conservée pendant les radios ou le IRM.

HEXOR® s'adapte parfaitement à l'anatomie de la jambe grâce à sa partie postérieure souple et son stabilisateur permet de limiter toute rotation de la jambe au repos. Le confort du patient est

considérablement amélioré en raison de la **légèreté de l'orthèse**, ce qui facilite la déambulation avec des cannes anglaises. HEXOR® est une attelle à usage unique, ce qui permet de garantir une **aseptie parfaite**.

Option capitonnage :

[Ref. ATTCART2 - Option capitonnage pour attelle pied et cheville Hexor](#)

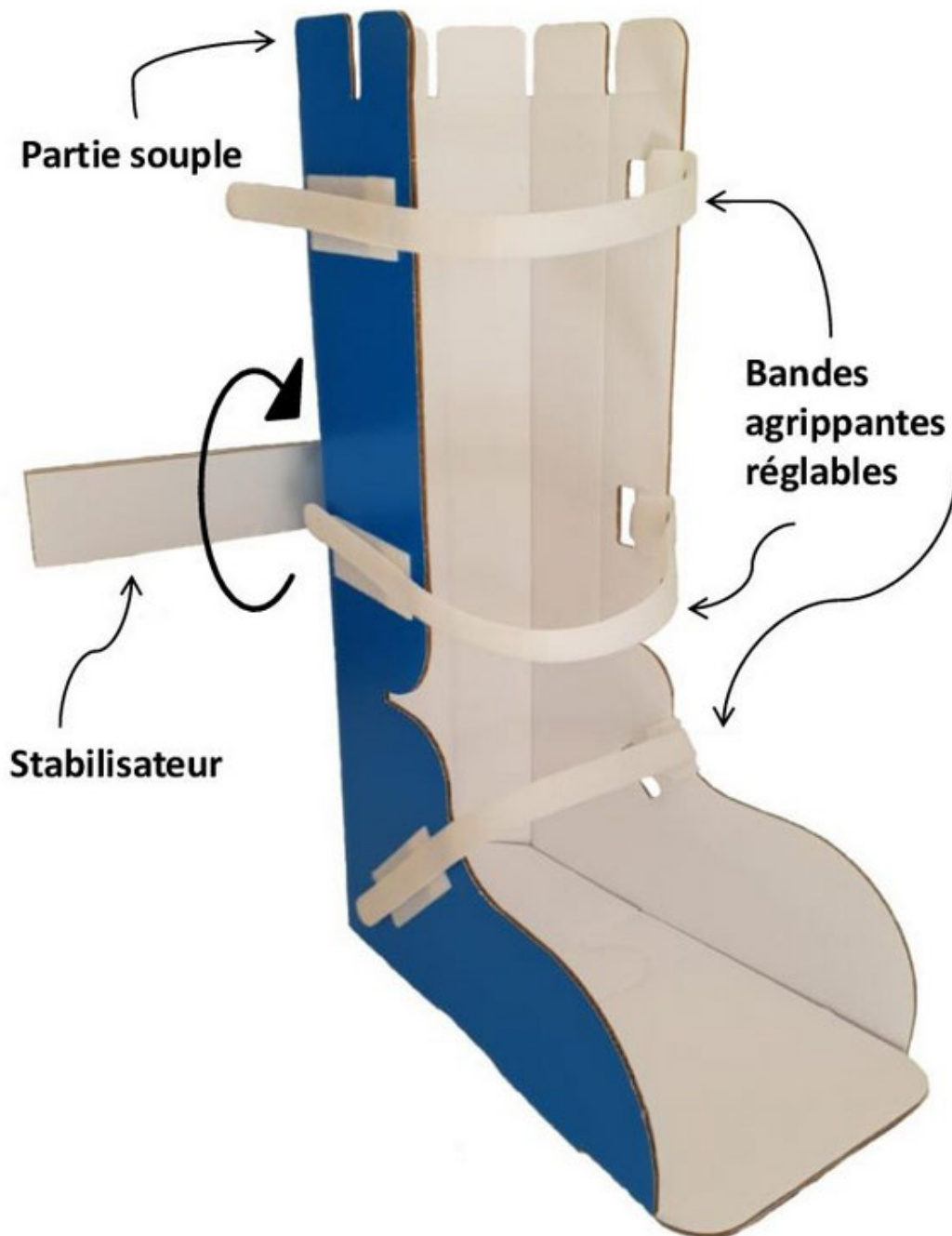

Pourquoi utiliser une attelle à usage unique ?

Utilisable en chirurgie du pied et de la cheville dès qu'il y a besoin d'immobilisation, en

traumatologie comme système de contention, en médecine du sport comme un dispositif d'urgence et les services intervenants en urgences sur des accidents et incidents (urgences, pompiers, ambulances...).

Cette attelle peut donc être utilisée par exemple pour :

- - la chirurgie du pied et de la cheville
- - la traumatologie
- - [rééducation](#) fonctionnelle
- - en prévention des déformations ostéo-articulaires
- - traumatologie du sport.

Dans quel secteurs ?

- - Service Orthopédie et traumatologie
- - Centre de rééducation fonctionnelle
- - Ehpad
- - Centres médico-sportif
- - Centre de Sécurité Civile
- - Urgences
- - Centre de secours

Découvrez nos autres [dispositifs pour l'immobilisation](#)