

# Thermomètre digital électronique flexible PIC

Référence 06601

Prix du produit :

**4,74 € taxe inclu**



Description brève du produit :

**Thermomètre digital pour les enfants et les adultes.**

Grâce à sa sonde flexible, ce [thermomètre](#) digital n'est pas traumatisant pour les enfants. Prise de température en 60 secondes.

Description du produit :

**Un thermomètre digital pour les enfants et les adultes.**

Ce [thermomètre](#) électronique est économique et sera utile pour toute la famille.

Caractéristiques techniques :

- Sonde flexible non traumatisante pour les enfants
- Grand écran lumineux
- Prise de température en 60 s
- Plage de température : 32-42,9°C
- Alarme annonçant la fin de la prise de température
- Alarme fièvre
- Mémoire dernière mesure
- Bouton marche/arrêt
- Affichage à cristaux liquides
- Etui antichoc
- Pile lithium +/- 1000 mesures modèle LR41
- Testé cliniquement

## Garantie à vie. CE.

### Conseils d'utilisation :

Lavez-vous les mains et séchez les avant la prise de mesure.

Positionnez le thermomètre correctement en fonction de la prise de température (rectale, orale, axillaire)

- Pour la **prise de température rectale**, adaptée aux nouveau-nés et aux enfants : positionnez délicatement le thermomètre dans le rectum à une profondeur maximum de 0,5 cm. Si on sent une résistance, interrompre immédiatement, ne pas forcer la sonde. Pendant la mesure, tenir le thermomètre en place.
- Pour la **prise de température orale** : assurez-vous que le patient n'a pas mangé ou bu au moins 15 minutes avant la prise de mesure. Poser la pointe du thermomètre sous la langue en s'assurant que le capteur métallique soit complètement en contact avec le tissu. Assurez-vous que la bouches reste fermée pendant la prise de mesure et respirez par le nez.
- Pour la **prise de température axillaire** : s'assurer que l'aisselle soit sèche et que les vêtements n'empêchent pas de mettre la sonde correctement en place. Cette mesure demande plus de temps.

## Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>