

Thermomètre électronique Thermoval® Hartmann

Référence 06866

Prix du produit :

3,93 € taxe inclu

Description brève du produit :

[Thermomètre](#) électronique pour une mesure de la température rectale, orale et axillaire avec sonde étanche à usage médical avec dispositif à maximum, comportant une sonde de température et un ensemble indicateur relié de façon permanente l'un à l'autre.



Description du produit :

Thermomètre rectal, orale et axillaire Thermoval® Standard

Ce [thermomètre](#) électronique est économique et sera utile pour toutes les familles.

Le thermomètre protégé par un fourreau plastique est présenté individuellement dans une boîte (145 x 50 x 18 mm).

Composition :

- Boîtier : ABS
- Élément protecteur de la sonde : acier
- Affichage à cristaux liquides 3 chiffres
- Bouton on/off : caoutchouc synthétique
- Pile alcaline, LR41, 1,55 V

Caractéristiques techniques du thermoval® :

- Etendue de mesure : 32,0 °C - 42,9 °C

- Echelon de mesure : 0,1 °C dans la gamme comprise entre 35,5°C et 42°C et 0,2°C pour le reste de la gamme

Propriétés :

- Indication de température basse (à 32 °C) : Lo°C
- Indication de température haute (> à 42,9 °C) : HI°C
- Signal sonore indiquant la mise en route de l'appareil et la fin de la mesure
- Déconnexion automatique
- Mémoire de la dernière mesure
- Pile longue durée pouvant être remplacée (env 3000 mesures)
- Temps de mesure : 1 min. env.

Mesure de la température :

* mesure axillaire : température rectale + 0,5 °C à 1,5 °C

* mesure buccale : température rectale + 0,3 °C à 0,8 °C

Absence de latex.

Garantie 2 ans. CE.

Conseils d'utilisation :

Lavez-vous les mains et séchez les avant la prise de mesure.

- Positionnez le thermomètre correctement en fonction de la prise de température (rectale, orale, axillaire)
- Pour la prise de température rectale, adaptée aux nouveau-nés et aux enfants : positionnez délicatement le thermomètre dans le rectum à une profondeur maximum de 0,5 cm. Si on sent une résistance, interrompre immédiatement, ne pas forcer la sonde. Pendant la mesure, tenir le thermomètre en place.
- Pour la prise de température orale : assurez-vous que le patient n'a pas mangé ou bu au moins 15 minutes avant la prise de mesure. Poser la pointe du thermomètre sous la langue en s'assurant que le capteur métallique soit complètement en contact avec le tissu. Assurez-vous que la bouches reste fermée pendant la prise de mesure et respirez par le nez.?
- Pour la prise de température axillaire : s'assurer que l'aisselle soit sèche et que les vêtements n'empêchent pas de mettre la sonde correctement en place. Cette mesure demande plus de temps.

Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>