

Nettoyeur à ultrasons Comed avec chauffage 6,5 L

Référence 06913



Prix du produit :

399,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Dispositif permettant de nettoyer des instruments de chirurgie ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.

Description du produit :

Nettoyeur à ultrason 6,5 L digital Comed

Pour le nettoyage des [instruments de chirurgie](#) ou des instruments dans le domaine médical et paramédical.

Caractéristiques du nettoyeur Digital comed :

Livré avec un couvercle et un panier.

Puissance du chauffage : 180 W.

Ultrasons : 40 KHz.

Réglage de la température : de 20 à 80 °C.

Minuterie : de 0 à 30 min.

Dimensions de la cuve : 300x150x150 mm.

Avec vidange.

Poids : 5,5 kg.

Garantie 1 an.

Comment utiliser le nettoyeur à Ultrasons ?

Remplissez la cuve de liquide nettoyant en adaptant la quantité à la pièce à nettoyer. Branchez sur secteur. Réglez la température puis le temps de nettoyage. Lorsque le voyant «Nettoyage » s'allume, la minuterie se déclenche, le [nettoyeur à ultrasons](#) est en marche. Lorsque la minuterie retombe à zéro, l'appareil s'arrête automatiquement de fonctionner. Si vous tournez le bouton de la température jusqu'à zéro, l'appareil va cesser de chauffer.

Après utilisation, retirez le liquide de nettoyage.