


Test de grossesse Simply by Exacto

Référence 07062

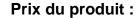

1,60 € taxe inclu



Description brève du produit :

Ce <u>test de grossesse</u> permet de déterminer si votre patiente est enceinte avec une précision de 99,99%. Facile à utiliser, il s'utilise au premier jour de la date présumée des règles.

Description du produit:

Test de grossesse fiable à 99,99%!

Le test de grossesse Exacto Simply permet de déterminer si la femme est enceinte avec une précision de 99.99% pour une sensibilité de 25UI/L pour un petit prix. Il s'utilise au premier jour de la date présumée des règles.

Mode d'emploi du test de grossesse :

- Oter le capuchon. Tenir le test 10 à 15 secondes directement sous le jet d'urine. Ne pas uriner sur les fenêtres Test et Contrôle.
- Il est également possible de recueillir les urines dans un récipient propre et sec puis d'immerger la mèche dans l'urine pendant 10 à 15 secondes.
- Replacer le capuchon sur la mèche et poser le test à plat, les fenêtres Test et Contrôle orientées vers le haut.
- Attendre 3 minutes.
- Si aucun résultat n'apparaît, attendre une minute supplémentaire.
- Ne pas lire après 10 minutes.

Caractéristiques



Design

Le test est un stylo avec capuchon à utiliser sous le jet d'urine.

- Test sous forme de stylo avec capuchon
- Sensibilité de 25UI/L
- Précision de 99.99%
- S'utilise au premier jour de la date présumée des règles

Boîte de 1 test

CE.

Qui peut utiliser ce test de grossesse?

Convient à toute femme en âge de procréer.