

Test d'ovulation Exacto Biosynex

Référence 07063



Prix du produit :

19,28 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce test d'ovulation est conçu pour détecter les 2 jours les plus fertiles du cycle avec une précision de 99,99%. Pour un usage in vitro uniquement. Convient aux femmes dont le désir d'enfant n'aboutit pas spontanément.

Description du produit :

Test d'ovulation fiable à 99,99% !

Le [test d'ovulation](#) Exacto est conçu pour détecter les 2 jours les plus fertiles du cycle avec une précision de 99.9% et une sensibilité de 40 UI/L.

Mode d'emploi du test d'ovulation Exacto :

- Oter le capuchon. Tenir le test 10 à 15 secondes directement sous le jet d'urine.
- Ne pas uriner sur les fenêtres Test et Contrôle.
- Replacer le capuchon sur la mèche et poser le test à plat, les fenêtres Test et Contrôle orientées vers le haut.
- Attendre 3 minutes.
- Si aucun résultat n'apparaît, attendre une minute supplémentaire.
- Ne pas lire après 10 minutes.

Caractéristiques

Design

Le test se présente comme un stylo avec un capuchon à retirer pour pouvoir l'utiliser.

- Test sur stylo pour une utilisation à domicile
- Ouvrir le sachet aluminium juste avant la réalisation du test
- Conserver dans un endroit sec à 2 –30°C
- Ne pas laisser à la portée des enfants
- Pour un usage in vitro uniquement
- Ne pas ingérer

Boîte de 10 tests d'ovulation Exacto

CE.

Qui peut utiliser ce test d'ovulation ?

Convient aux femmes dont le désir d'enfant n'aboutit pas spontanément.