

# Thermomètre électronique Exacto - Flexible

Référence 07178



**Prix du produit :**

**4,59 € taxe inclu**

**Description brève du produit :**

Le [Thermomètre](#) Digital Exacto® Rigide pour une prise de température corporelle rapide en 10 secondes.

Ce thermomètre peut-être utilisé de manière différente rectale, axillaire et orale.

**Description du produit :**

**Thermomètre Exacto pour tous fiable, rapide et précis..**

- 100% étanche pour une désinfection et un nettoyage complet de l'appareil.
- Résultat entre 9 et 11 secondes (mesure rectale) pour une prise de température rapide.
- Sonde flexible adaptée aux enfants et aux nourrissons.

**Caractéristiques du [thermomètre](#) :**

- 1 bouton pour une mesure pour une grande simplicité d'utilisation
- Mise en veille automatique
- Jusqu'à 100 heures d'utilisation avant changement de la pile
- 4 couleurs panachées
- Intervalle de mesures: (32,0 °C - 42,9 °C) avec une précision des mesures de  $\pm 0,1$  °C (35,5 °C - 42,0 °C)  $\pm 0,2$  °C (32,0 °C - 35,5 °C)
- Température ambiante pendant l'utilisation: ( 5 °C - 35 °C ),  $\leq 80$  % RH
- Echelle min.: 0,1 °C
- Type de pile: Pile au manganèse alcaline, type LR41, 1,5 V
- Durée de vie minimum des piles : 100 heures en service continu ou 3 ans • Poids: environ

13g

- Pression atmosphérique : [700 - 1060](#) hPa

**CE.**

### **Conseil d'utilisation :**

#### **Avant**

- Stocker le thermomètre dans la pièce dans laquelle sera prise la mesure.
- Laisser la sonde se stabiliser pendant 4 à 5 heures dans la pièce avant la première utilisation
- Suivre les instructions d'utilisation de la notice.
- Prendre sa mesure le matin et le soir, à l'achat de l'appareil, afin de connaître ses valeurs de température corporelle.
- Ne pas garder le thermomètre en main trop longtemps avant une mesure

#### **Pendant**

- Prendre la mesure au moins 30 minutes après un exercice physique, un repas ou un bain
- Laisser reposer l'appareil 2 à 3 minutes entre chaque mesure.

#### **Après**

- Noter les valeurs obtenues afin de suivre l'évolution de la température et de la transmettre à votre médecin.
- Entretenir le thermomètre en suivant les instructions de la notice.
- Nettoyer la sonde de mesure avec un chiffon doux et de l'alcool dilué, puis laisser sécher.

### **Mode d'emploi :**

1. Appuyer sur le bouton on/off pour allumer le thermomètre, l'appareil se met en marche et effectue un auto-contrôle en même temps, vous entendrez un bip sonore lorsque le contrôle est terminé.
2. Lorsque les lettres «Lo» et «C» clignotent sur l'écran, le thermomètre est prêt à l'emploi.
3. Pendant la prise de température, la température mesurée s'affiche sur l'écran de contrôle et les symboles «°C» clignotent. La température précise est atteinte lorsqu'elle l'affichage de la température se fige
4. Un bip sonore est alors émis 4 fois et le symbole « °C » cesse de clignoter. La mesure la plus élevée apparaît sur l'écran.
5. Une fois la température prise, éteindre le thermomètre en appuyant sur le bouton ON/OFF. Le thermomètre s'éteint automatiquement au bout de 10 minutes si aucune action n'est faite.
6. En cas de doute sur l'interprétation de la mesure, demander conseil à votre médecin.

## Comment bien prendre la température ?

<https://www.ameli.fr/ardecche/assure/sante/bons-gestes/soins/prendre-temperature>