

Change complet pour adultes - SUPER SENI PLUS

Référence 07350S



Prix du produit :

9,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les [changes complets](#) **SUPER SENI PLUS** pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale forte.

Vendu par paquet de 30.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :



Change complet pour adultes SUPER SENI PLUS

Le Super Seni Plus est un change complet de la marque Seni.

Il se pose à l'aide d'**adhésifs réajustables** qui garantit une fixation parfaite.

Ce change complet est en **non tissé**, hypo-allergénique, procurant confort et bien-être.

Son voile sensation coton est doux, aéré et rend le produit silencieux.

Le Super Seni Plus convient aussi bien pour les femmes que pour les hommes.

Sa nouvelle technologie New Core Concept est axée sur l'absorption maximum. La diffusion

rapide et totale de différents noyaux donne un effet garde-au-sec.
Il est doté de barrières intégrales hautes et d'une ceinture élastique pour un ajustement précis.
Enfin, il prévient la formation d'odeurs et maintient le pH de la peau neutre.

Guides des tailles :

SUPER SENI PLUS				
Taille	S	M	L	XL
Tour de Hanche (cm)	55-80	75-110	100-150	130-170
Nbr Pièces par Paquet	30 pièces	30 pièces	30 pièces	30 pièces

Caractéristiques des couches pour adultes SUPER SENI PLUS :

- Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Voile de distribution "EDS".
- Barrières latérales placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur non-tissé élastique.
- Protection supplémentaire antifuites dans la zone inguinale.
- Taille élastique localisée à l'avant et à l'arrière du produit.
- 4 scratchs élastiques multi repositionnables.
- Deux indicateurs d'humidité : un imprimé noir qui devient flou et deux bandes de colle jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée.
- Couche d'isolation, stratifié perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec deux bandes violettes, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution blanc (EDS), non-tissé enveloppe hydrophobe, buvard hygiénique, taille élastique, non tissé - élastomère placé au niveau du périnée et dans les barrières latérales, scratchs élastiques, encre indicatif, colle indicative, colles, extrait naturel de thé vert.

Pour qui sont conseillées ces couches pour adultes ?

- Le Super Seni Plus est généralement utilisé le jour. Il peut cependant être utilisé la nuit si l'absorption est suffisante.
- Ces changes conviennent en cas d'**incontinence urinaire ou fécale forte**.
- Le Super Seni Plus est une bonne solution pour les patients actifs.

- Il reste bien en place, même chez des patients agités ou désorientés.

Quand faut-il changer la couche ?


- Un indicateur d'humidité est imprimé sur la protection.
- Il faut le changer dans l'un des cas suivants :
 - Une bonne partie du testeur d'humidité a disparu.
 - Le changement a fortement augmenté de volume.
 - La durée du placement est écoulé.



Comment mettre en place les couches pour adultes SUPER SENI PLUS ?

- Afin d'utiliser cette protection correctement, lisez attentivement les conseils de mise en place du Super Seni Plus ci-dessous :

Placer le change en position debout :

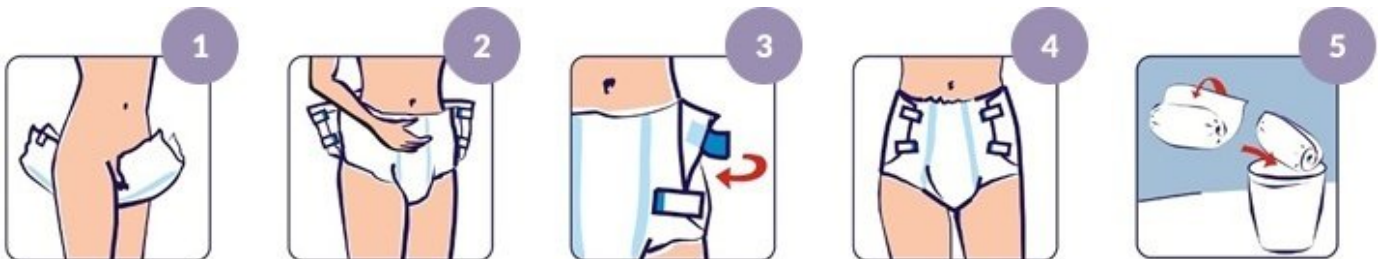

1. Placez la partie arrière (partie large) de la protection préalablement déployée sur le postérieur. Veillez à ce que le bord supérieur non replié se situe à hauteur de la ceinture dorsale du patient. L'indicateur d'humidité doit être positionné dans l'axe du sillon inter-fessier.
2. Glissez avec douceur la partie avant de la protection entre les jambes du patient. Tirez avec douceur de gauche à droite sur la partie avant de la protection sur le bas-ventre. Veillez à ce que les élastiques soient bien positionnés dans les plis inguinaux. Ouvrez la partie avant de la protection, et la déployer sur le ventre.
3. Glissez avec douceur la partie avant de la protection entre les jambes du patient. Tirez avec douceur de gauche à droite sur la partie avant de la protection sur le bas-ventre. Veillez à ce que les élastiques soient bien positionnés dans les plis inguinaux. Ouvrez la partie avant de la protection, et la déployer sur le ventre.
4. Fixez les adhésifs du bas, en les ramenant vers le centre de la partie avant de la protection. Collez ensuite les adhésifs du haut, les ramener légèrement vers le bas de la partie avant de la protection.

5. Assurez-vous que la tension de la ceinture élastique soit correcte, afin d'éviter tout baillement. Vérifier une dernière fois la position de la protection dans les plis linguinaux.
6. Le change est effectué et correctement positionné.

Retirer le change en position debout :

1. Décollez les adhésifs de la protection et les recoller sur eux-mêmes directement. Repliez sur elle-même la partie arrière de la protection.
2. Retirez la protection de l'entrejambe, en la tirant vers l'arrière. Effectuez la toilette.

Placer le change en position couché :



1. Placez la partie arrière (partie large) de la protection préalablement déployée sur le postérieur et glissez la protection sous le postérieur du patient. Veillez à ce que le bord supérieur non plié se situe à hauteur de la ceinture dorsale du patient.
2. L'indicateur d'humidité doit être positionné dans l'axe du sillon inter-fessier.
3. Ouvrez la partie avant de la protection, et la déployer sur le ventre. Tirez avec douceur de gauche à droite sur la partie avant de la protection sur le bas-ventre.
4. Fixez les adhésifs du bas, en les ramenant vers le centre de la partie avant de la protection. Collez ensuite les adhésifs du haut, les ramener légèrement vers le bas de la partie avant de la protection.
5. Assurez-vous que la tension de la ceinture élastique soit correcte, afin d'éviter tout baillement. Vérifier une dernière fois la position de la protection dans les plis linguinaux.
6. Le change est effectué et correctement positionné.

Retirer le change en position couché :

1. Décollez les adhésifs de la protection et les recoller sur eux-mêmes directement. Repliez sur elle-même la partie avant de la protection.
2. Placez la personne sur le côté. Repliez sur elle même la partie arrière de la protection. Retirez la protection de l'entrejambe, en la tirant vers l'arrière. Effectuez la toilette.

Comment conserver les couches SUPER SENI PLUS ?

A stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

En savoir plus sur la marque SENI :

Crée dans les années '90 au sein du Groupe TZMO, **Seni est aujourd'hui le symbole de la qualité des [produits d'incontinence](#)**. Reconnue dans le monde entier, la marque Seni vous offre une gamme de produits pour tout type et tout degré de fuites urinaires.

Pour pouvoir vous garantir une qualité exceptionnelle de nos produits, nous sélectionnons les meilleures matières premières, nous investissons dans de nouveaux outils de fabrication, nous testons la résistance, la capacité d'absorption et la performance des protections dans nos laboratoires en cherchant à les améliorer constamment. Le savoir-faire de l'ensemble de nos équipes permet d'apporter des solutions innovantes dans les gammes existantes ainsi que de proposer de nouveaux produits.

Sans latex, sans chlore, sans substance nocive, les produits d'incontinences Seni garantissent à ses utilisateurs un **grand confort d'utilisation** et une imperméabilité, - **l'effet d'être au sec - tout en restant respirants.**

Pour en savoir plus sur les garantie de Seni, cliquez [ici](#).