

Change complet pour adultes - SUPER SENI TRIO

Référence 07351-S



Prix du produit :

4,16 € taxe inclu

Description brève du produit :

Les [changes complets](#) **SUPER SENI TRIO** pour les personnes souffrant de l'incontinence urinaire et fécale forte et très forte. Le produit est muni d'un indicateur d'humidité qui signale la nécessité de changement de la protection.

Vendu par paquet de 10.

Dispositif médical de classe I.

Description du produit :

Change complet pour adultes SUPER SENI TRIO

Solution idéales pour les personnes souffrant de fuites urinaires fortes à très fortes.

Le modèle Super Seni TRIO propose des propriétés idéales :

- ajustement parfait à la morphologie (taille élastique devant et derrière et les attaches extensibles),
- protection anti-fuites latérales sûre,
- neutralisation de l'odeur désagréable,
- absorption rapide et efficace,
- respiration de la peau,
- minimisation du risque des irritations,
- cutanées attaches multi-fixation.

Les [changes pour adultes](#) **SUPER SENI TIRO** sont disponibles en 4 tailles :

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)	UNITÉS DANS UN EMBALLAGE
small	55 - 80	10
medium	75 - 110	10
large	100 - 150	10
extra large	130 - 170	10

Caractéristiques :

- Deux coussins absorbants anatomiques en pulpe de cellulose avec superabsorbant.
- Voile de distribution "EDS".
- Barrières latérales placées le long du coussin absorbant et orientées vers l'extérieur non-tissé élastique.
- Protection supplémentaire antifuites dans la zone inguinale.
- Taille élastique localisée à l'avant et à l'arrière du produit.
- 4 scratchs élastiques multi repositionnables.
- Deux indicateurs d'humidité : un imprimé noir qui devient flou sous l'effet du liquide et deux bandes de colle jaunes qui deviennent vertes lorsque la protection est saturée.
- Couche d'isolation perméable à la vapeur sur toute la surface.

Matières premières :

Cellulose, superabsorbant, stratifié perméable à la vapeur blanc avec deux bandes couleur verte, non-tissé externe bifonctionnel : hydrophile et hydrophobe, non-tissé de distribution blanc (EDS), non-tissé enveloppe hydrophobe, buvard hygiénique, taille élastique, non tissé - élastomère placé au niveau du périnée et dans les barrières latérales, scratches élastiques, encre indicatrice, colle indicatrice, colles, extrait naturel de thé vert.


Ces [couches pour adultes et seniors](#) sont à stocker dans leurs emballages d'origine, dans un espace sec et bien aéré avec une température entre 5°C et 35°C et une humidité inférieure ou égale à 70%.

Les emballages doivent rester intacts, enveloppés dans le film afin d'éviter tout contact avec la poussière et d'autres impuretés ou odeurs.

Date limite d'utilisation : 60 mois.

Comment mettre et utiliser les changes absorbants Super Seni trio ?

Poser en position debout

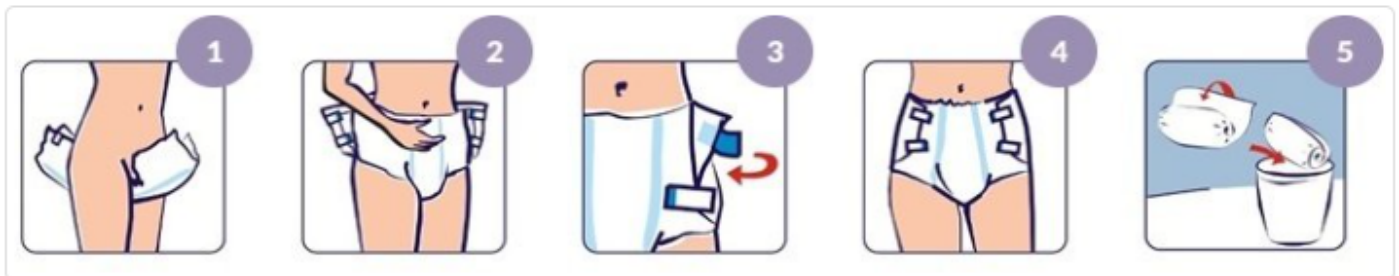

Poser en position allongée



Précautions et utilisations des changes adultes Super Seni :

Attention: Pensez à « activer » le change complet avant toute utilisation.

Mise en place des changes absorbants en position debout tout seul ou avec l'aide de quelqu'un :

Glissez le change plié dans le sens de la longueur (en forme de godet) d'avant en arrière.. Centrez le coussin absorbant arrière.

Commentaires pour l'aide-soignante :

- Position de l'indicateur d'humidité dans le prolongement de la colonne vertébrale.
- La personne peut vous aider à mettre en place le change en la tenant sur son bas-ventre. Réajustez l'avant de la protection. Fixez le change complet à l'aide des deux velcro-adhésifs en commençons par l'adhésif du bas, en le fixant légèrement vers haut. Après cela, fixez les velcro-adhésifs de haut en adaptant la protection à votre morphologie. Vérifier que les plis au niveau de l'entre-jambe soient bien positionnés et que les barrières anti-fuites soient placées dans les plis de l'aîne. Après avoir placé le change vérifiez son bon ajustement et assurez-vous qu'il ne vous gêne pas. Réajustez si nécessaire à l'aide des adhésifs repositionnables. Enrouler le change complet usé et le jeter à la poubelle. Ne pas jeter dans les toilettes

Mise en place des changes absorbants sur une personne alitée :

Mettez-vous au bord du lit de la personne et pliez le genou dans l'une de ses jambes. Attention: si vous vous tenez sur le côté droit, pliez la jambe gauche et vice versa. Placez la personne sur le côté et faites glisser le change (déjà « activé ») entre les jambes.

Attention:

- N'oubliez pas, à replier l'aile de la couche-culotte, ce qui aidera à la manipuler plus facilement dans son installation au dos de la personne.
- Position de l'indicateur d'humidité dans le prolongement de la colonne vertébrale. Placez la personne sur le dos, redresser ses jambes et déployez l'aile latérale vers les hanches. Réajustez l'avant de la protection. Fixez le **change complet** à l'aide des deux velcro-adhésifs en commençons par l'adhésif du bas, en le fixant légèrement vers haut. Après cela, fixez les velcro-adhésifs du haut, en adaptant le change à votre morphologie. Vérifier que les plis au niveau de l'entre-jambe soient bien positionnés et que les barrières anti-fuites soient placées dans les plis de l'aîne. Après avoir placé le change vérifiez son bon ajustement et assurez-vous qu'il ne vous gêne pas. Réajustez si nécessaire à l'aide des adhésifs repositionnables.