


# Pansement Hydrocellulaires stériles - SYLALEX

Référence 07478

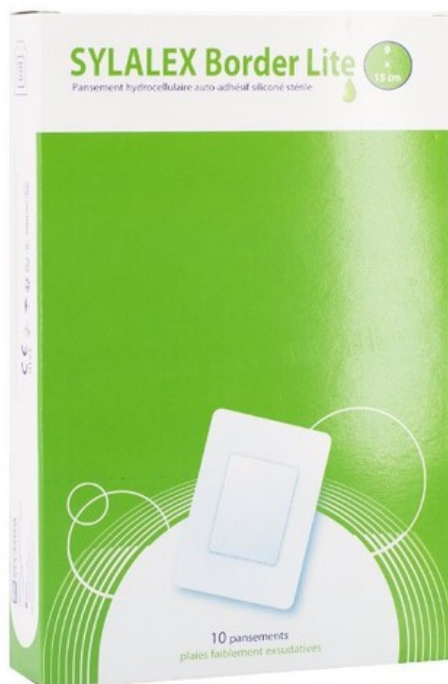

Prix du produit :

**5,99 € taxe inclu**

Description brève du produit :

## Pansement Hydrocellulaires stériles - SYLALEX

Découvrez les [pansements](#) hydrocellulaires stérile SYLALEX spécialement conçu pour absorber les exsudats tout en maintenant un milieu humide et minimise les risques de macération. Les pansements SYLALEX sont parfaitement adapté pour les plaies aiguës et chroniques, superficielles à profondes et bourgeonnantes exsudatives.

- **BORDER** = absorption importante
- **BORDER LITE** = absorption moyenne

Disponible en 10 tailles, 10 ou 16 sachets par boîte suivant la taille.

Dispositif médical de classe IIb stérile selon l'annexe IX de la Directive 93/42/CEE modifiée par la directive 2007/47/CE.

## Description du produit :

### Pansement Hydrocellulaires stériles - SYLALEX

Les pansements SYLALEX sont composé de trois couches :

- Une couche siliconé côté plaie permettant de pas adhérer à la plaie.
- Une mousse de polyuréthane permettant l'absorption d'exsudats.
- Un film externe étanche à l'eau, perméable à la vapeur.

*Absence de latex, absence de produits d'origine animale et absence de phtalates.*

## Caractéristiques

- Non-adhérence à la plaie, adhérence optimale sur le pourtour.
- Absorbance de l'exsudat, même sous compression.
- Retrait atraumatique et indolore.
- Souplesse et conformabilité.
- Permet la douche.
- Durée de validité du produit : 3 ans à partir de la date de fabrication.
- Classification CLADIMED : F51BB01
- Mode de stérilisation : A l'oxyde d'éthylène selon la norme NF EN ISO 11135-1:2014.

## Conseil d'utilisation

- Dispositif à usage unique, ne pas le réutiliser.
- Vérifier l'intégralité de l'emballage avant utilisation.
- La stérilité est garantie tant que le sachet est intact.

## Mode d'emploi

Nettoyer la plaie selon les procédures habituelles. Sécher soigneusement la peau périsionnelle. Retirer le feuillet protecteur d'un côté et fixer le côté adhésif, bien lisser en retirant le 2ème feuillet protecteur en s'assurant que le pansement adhère bien.

Appliquer le pansement sur la plaie en débordant de 2 cm autour.

Le changement du pansement est fonction de la saturation. Il peut demeurer en place jusqu'à 7 jours en fonction de la quantité d'exsudats.

## Précaution d'emploi

- Ne pas utiliser sur une nécrose sèche.
- Ne pas utiliser le pansements en même temps que des agents antioxydants tels le dakin ou l'eau oxygénée (dégradation des composants du pansement).

**Ne sont pas compatibles avec une utilisation chez le nouveau-ne?, le nouveau-ne? pre?mature? et le nourrisson de moins de 3,5 Kg.**

**Condition de stockage :** Au sec et à l'abri du soleil.

**Mode de destruction :** Par incinération.