

SURFANIOS Premium détergent désinfectant Anios

Référence 00049



Prix du produit :

33,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Détergent désinfectant sols et surfaces
Surfanios Premium.

Description du produit :

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux non invasifs avant leur utilisation et selon leur notice d'utilisation.

Application biocide : pour les surfaces générales.

Temps de contact court !

SOLUTION CONCENTREE:

*Dilution entre **0,25** et **0.5** %.*

INDICATIONS	Nettoyage et désinfection des sols, murs et matériel médical et dispositifs médicaux non invasifs.
COMPOSITION	Solution limpide de couleur verte. pH pur 7 +/- 0.5. pH à 0.25% en eau du réseau = 7,3.

	Chlorure de didécyldiméthylammonium (N°CAS 7173-51-5 : 82 mg/g), Digluconate de chlorhexidine (N°CAS 18472-51-0 : 5.2 mg/g), excipients.
PROPRIETES	<ul style="list-style-type: none"> - Bactéries : EN 1040, EN 13727, EN 1276 en 5 min, EN 13697 en 30 min/0.25% ou 15 min/0.5%, BMR selon EN 1276 en 5 min, BMR selon EN 13697 en 15 min. - Mycobactéries : Mycobacterium terrae : EN 14348, EN 14563 en 60 min/0.25% ou 30 min/0.5%. - Levures : EN 1275, EN 13624, EN 1650 en 15 min, EN 13697 en 30 min/0.25% ou 15 min/0.5%. - Moisissures : EN 1275 en 15 min, EN 1650 en 120 min, EN 13697 en 30 min. - Virus : HIV-1, PRV (virus modèle de HBV), BVDV (virus modèle de HCV), HSV, Rotavirus, Vacciniavirus en 5 min, Coronavirus (virus modèle du SRAS) en 15 min.
MODE D'EMPLOI	<ul style="list-style-type: none"> • Mode d'emploi simple. • Remplir un seau de lavage avec 8 litres d'eau. Dilution à 0,25% : verser une dose de 20 ml de Surfanios Premium dans le seau de lavage. • Après avoir effectué un balayage humide de la pièce, procéder au lavage en respectant le schéma de nettoyage : du fond vers la sortie. • Le rincage est inutile sauf si les zones à traiter sont destinées à être en contact avec la peau, les muqueuses ou les denrées alimentaires. • Changer de franges autant de fois que nécessaire. Mettre la frange sale dans le récipient prévu à cet effet. • Après le nettoyage de chaque secteur, changer la frange, renouveler la solution de lavage.
PRECAUTIONS D'EMPLOI	Dangereux - respectez les précautions d'emploi (Établies selon les règles européennes en vigueur en matière de classification et d'étiquetage des produits chimiques). Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette

et les informations concernant le produit.

Produit biocide destiné à la désinfection des surfaces (Groupe 1 – TP2) et dispositif médical de classe IIa - usage réservé aux professionnels.

Stocker entre +5°C et +35°C.

- Produit biocide (Groupe 1 - TP2). Dispositif médical
- Double action : Produit combinant les actions détergente et désinfectante en une opération simultanée
- Large spectre antimicrobien en temps de contact court
- Agent séquestrant facilement biodégradable