

COMPRESSE DE LIN UNIVERSELLE THERMORÉGULATIVE TOP'KINE - 48 x 34 cm

Référence 08374



Prix du produit :

16,99 € taxe inclu

Description brève du produit :

La compresse de lin universelle TOP'KINE en format **48 x 34 cm** s'emploie aussi bien à chaud qu'à froid pour une diffusion thermique régulière. Sa composition en lin naturel réutilisable apporte souplesse d'application et confort de contact en thermothérapie comme en cryothérapie.

100% Naturel • Utilisation Chaude Et Froide •
Restitution Progressive • 48 X 34 Cm

Description du produit :

Compresse de lin universelle TOP'KINE, usage chaud et froid

Cette compresse thermique est conçue pour une application locale à chaud ou à froid selon le besoin. La **compresse de lin universelle TOP'KINE** de **48 x 34 cm** offre une diffusion maîtrisée de la température avec un contact souple et agréable.

Sa garniture en **lin naturel** lui permet de bien se positionner sur différentes zones du corps. Elle convient à la préparation tissulaire avant mobilisation comme à une utilisation en **cryothérapie** après la séance.

Le passage au micro-ondes demande **2 à 3 minutes** pour une préparation à chaud. Pour le froid, prévoyez **30 minutes à 2 heures** au congélateur. Idéal pour les kinésithérapeutes, ostéopathes, cabinets médicaux, centres de rééducation et professionnels du sport.

Points forts

- **Application chaud/froid** : un seul accessoire pour alterner entre thermothérapie et cryothérapie selon l'usage recherché.
- **Grande surface utile** : le format **48 x 34 cm** permet de couvrir confortablement des zones étendues comme le dos, les épaules ou les membres.
- **Garnissage en lin naturel** : la composition à base de graines de lin favorise une bonne souplesse et un contact plus confortable sur la peau.
- **Diffusion progressive** : le chaud comme le froid sont restitués de manière régulière pour limiter les sensations trop brusques pendant l'application.
- **Préparation rapide** : la mise en température se réalise simplement, en quelques minutes au micro-ondes ou après un temps adapté au congélateur.

Caractéristiques techniques

Dimensions : 48 x 34 cm

Marque : TOP'KINE

Type de produit : Compresse de lin universelle

Matériau : Lin naturel

Composition : Graines de lin, 100% naturel

Utilisation : Réutilisable

Fonctionnement : Thermothérapie et cryothérapie

Température d'utilisation : Chaud ou froid

Préparation à chaud : 2 à 3 minutes au micro-ondes

Préparation à froid : 30 minutes à 2 heures au congélateur

Propriété : Thermorégulative

Garantie : 2 ans

Normes & sécurité

Lire attentivement la notice avant utilisation

Des produits complémentaires à découvrir

Pour organiser les applications par le froid, les cuves thermo-cryothérapie constituent un complément pratique au cabinet. Les gel de massage cryo peuvent accompagner les soins après utilisation. Les tables de massage participent au bon confort d'installation du patient.