

# Marimer Eau de mer Isotonique Spray 100 ml Gilbert

Référence 08658



Prix du produit :

**6,75 € taxe inclu**

Description brève du produit :

**Marimer** est une solution d'eau de mer naturellement riche en sels minéraux et oligo-éléments marins.

Sa formule douce facilite l'évacuation des sécrétions nasales, aidant à dégager les voies respiratoires et à limiter les manifestations allergiques telles que la rhinite allergique

Description du produit :

Choisissez **Marimer** pour une **hygiène nasale** naturelle et efficace, améliorant votre confort respiratoire au quotidien.

- **Composition naturelle :**

- 100 % eau de mer diluée isotonique stérile (équivalent à 9 g/L de sels).
- Sans conservateur, préservant la pureté de la solution.

- **Indications :**

- **Hygiène nasale quotidienne** : Pour le lavage des fosses nasales.
- **Nez sec ou encombré** : Particulièrement efficace en cas de manifestations allergiques.

- **Avantages du dispositif :**

- Équipé d'un système de valve poche et d'un gaz propulseur, assurant une protection optimale de la formule contre les contaminations extérieures.
- Formule stérile pour une utilisation en toute sécurité.

**Mode d'emploi :**

- **Posologie :**

- **Adultes et enfants :** 1 à 2 pulvérisations par narine, 1 à 3 fois par jour selon les besoins.
- **Utilisation prolongée :** Peut être utilisé quotidiennement sur une période prolongée.

- **Conseils d'utilisation :**

- S'utilise en position assise ou debout.
- Inclinez la tête sur le côté et introduisez délicatement l'embout dans la narine.
- Pulvérisez puis répétez l'opération dans l'autre narine.

**Précautions d'emploi :**

- **Population concernée :**

- Convient aux adultes et aux enfants.
- **Ne pas utiliser chez les prématurés.**

- **Recommandations :**

- Lire attentivement la notice avant utilisation.
- Demander conseil à votre pharmacien en cas de doute.
- Tenir hors de portée des enfants.

**Efficacité :**

- **Cliniquement prouvée :** L'efficacité de Marimer a été démontrée lors d'études cliniques\*.

\*Résultats basés sur des études cliniques disponibles. Pour plus d'informations, consultez la notice du produit.