

Désinfectant instrument en poudre SEKUPSEPT AKTIV - 1,5 Kg

Référence 09275



Prix du produit :

47,90 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le désinfectant **Sekusept Aktiv** est une solution en poudre conçue pour le **nettoyage et la désinfection manuelle** des instruments médicaux **avant stérilisation ou désinfection finale**. Sans aldéhydes, sa formule à **base d'acide peracétique** élimine efficacement bactéries, mycobactéries, virus, champignons et spores bactériennes. Utilisation en bac de trempage ou bain à ultrasons.

seau de SEAU DE 1,5KG.

Description du produit :

Le **Sekusept Aktiv** est un **détergent et pré-désinfectant enzymatique alcalin** qui assure une **désinfection rapide et efficace** des **instruments médico-chirurgicaux contaminés** avant leur passage à l'autoclave. Grâce à sa **formule en poudre**, il offre une **excellente efficacité même à faible concentration**, tout en garantissant une **compatibilité avec divers matériaux médicaux**.

Caractéristiques principales

- Désinfection rapide dès 5 minutes.
- Élimine efficacement les résidus organiques sans fixer les protéines.
- Compatible avec la plupart des matériaux médicaux.
- utilisation dans un bac de trempage ou dans un bain à ultrasons

Propriétés microbiologiques

- **Bactéricide** : EN 13727 et EN 14561 (2 % - 5 min / 1 % - 60 min)
- **Levuricide** : EN 13624 et EN 14562 (2 % - 5 min / 1 % - 60 min)
- **Fongicide** : EN 13624 et EN 14562 (4 % - 15 min / 3 % - 30 min)
- **Mycobactéricide & Tuberculicide** : EN 14348 et EN 14563 (2 % - 15 min / 1 % - 60 min)
- **Virucide** : EN 14476 et EN 17111 (2 % - 15 min / 1 % - 30 min)
- **Sporicide** : EN 17126 (Clostridium difficile - 2 % - 15 min)

Avantages

- Haute efficacité microbiologique même à faible concentration.
- Ne contient pas d'aldéhydes.
- Facile à utiliser et économique.

Mode d'emploi

- **Diluer la poudre dans de l'eau** selon les recommandations.
- **Immerger les instruments** et veiller à une totale couverture.
- **Respecter le temps de contact** selon le micro-organisme ciblé.
- **Rincer soigneusement** avant la stérilisation ou la désinfection finale.

Précautions d'emploi

Dangereux – respecter les consignes de sécurité.

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.

Ne pas utiliser sur les instruments en laiton, cuivre, nickel ou chromés.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour [nettoyant instrument](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [désinfection nettoyage des instruments](#).