

DÉTERGENT PRÉ DÉSINFECTANT EXEOL SEPT FIRST 1L

Référence 09278



Prix du produit :

23,45 € taxe inclu

Description brève du produit :

Le **Détergent pré désinfectant Exeol Sept First** est une solution alcaline liquide, idéale pour le **nettoyage** et la **pré-désinfection** des instruments médicaux réutilisables, y compris l'instrumentation thermorésistante, thermosensible et d'endoscopie. Bactéricide, levuricide et actif sur BVDV et Norovirus. Dilution 0,5 % – Temps de trempage : 10 min.

BIDON DOSEUR DE 1L.

Description du produit :

Détergent Exeol Sept First Pour le nettoyage et la pré-désinfection par trempage après utilisation et avant stérilisation ou désinfection.

Pour l'instrumentation réutilisable, thermorésistante et thermosensible, l'instrumentation orthopédique, ophtalmologique, l'endoscopie souple et rigide.

Concentration d'utilisation : 0,4%.

- Actif en 10 minutes à la dilution de 0,4% (Bactéricide, Levuricide et Virucide contre les virus enveloppés)
- Actif en 30 minutes de 1% sur Mycobacterium terrae (tuberculocide).
- Performance détergente prouvée sur le biofilm selon la norme NF ISO 15883-5 : 2021
- Association d'agents complexants, facilement biodégradable, des ions métalliques et

alcalino-terreux : détergence renforcée en eau dure

- pH neutre
- Produit d'entretien à diluer et à rincer
- De marquage CE, dispositif médical de classe IIa
- Fabriqué en France
- Flacon de 1 litre

Mode d'emploi

- **Diluer à 0,4 %** dans de l'eau à température ambiante.
- **Immerger complètement les instruments** après leur utilisation.
- **Laisser tremper** pendant 10 minutes.
- **Rincer soigneusement** avant désinfection ou stérilisation.

Précautions d'emploi

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.

Respecter les précautions d'emploi.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour [nettoyant instrument](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [désinfection nettoyage des instruments](#).