

Clean excel D ANIOS - 25 ML (200)

Référence 09281

Prix du produit :

117,30 € taxe inclu



Description brève du produit :

L'Anios Clean Excel D est un **détergent pré-désinfectant** spécialement conçu pour le **nettoyage des instruments médicaux souillés**, y compris les **endoscopes souples** et **dispositifs thermosensibles**. Formule non corrosive, biodégradable et parfumée au citron. Action antimicrobienne dès 15 minutes. Dosage précis : 25mL pour 5L d'eau.

BOÎTE DE 200 DOSETTES.

Description du produit :

L'Anios Clean Excel D assure une pré-désinfection optimale des dispositifs médicaux avant leur passage en stérilisation ou désinfection finale. Grâce à son association brevetée de principes actifs, il élimine efficacement les **bactéries, virus, levures et mycobactéries**, tout en préservant l'intégrité des instruments chirurgicaux et thermosensibles.

Caractéristiques principales

- Haut pouvoir nettoyant et pré-désinfectant.
- Biodégradable, sans impact environnemental.
- Solution concentrée pour une dilution optimale.

Propriétés microbiologiques

- **Bactéricide** : EN 1040, EN 13727, EN 14561.
- **Mycobactéricide** : EN 14348, EN 14563 (M. terrae).

- **Levuricide** : EN 1275, EN 13624, EN 14562.
- **Virucide** : Actif sur **PRV (HBV), BVDV (HCV), HSV, Vaccinia virus, HIV-1.**

Temps de contact recommandé :

- **5 min à 0,5 %** pour bactéries et virus.
- **15 min à 0,5 %** pour levures.
- **60 min à 2 %** pour mycobactéries.

Utilisation recommandée :

- Pré-désinfection des instruments médicaux et chirurgicaux.
- Nettoyage des endoscopes souples.
- Bains de trempage et bacs à ultrasons.

Concept breveté : action antimicrobienne renforcée et évite la formation de biofilm.

Avantages

- Convient aux dispositifs médicaux thermosensibles.
- Format en dosettes pratiques pour un dosage précis.
- Utilisation simple et compatible avec les bacs à ultrasons.

Mode d'emploi

- Diluer 1 dosette de 25mL dans 5L d'eau froide ou tiède.
- Immerger complètement les instruments médicaux.
- Temps de trempage recommandé : 15 minutes (brossage si nécessaire).
- Rincer soigneusement à l'eau claire.
- Sécher avec un champ propre avant désinfection finale ou stérilisation.

Renouveler la solution au moins une fois par jour.

Double nettoyage recommandé pour le matériel endoscopique.

Précautions d'emploi

Lire attentivement l'étiquette avant utilisation.

Dangereux – respecter les consignes de sécurité.

CE.

Pour découvrir une sélection plus complète, veuillez retrouver plus de produits pour [nettoyant instrument](#) ou complétez votre kit en explorant dès maintenant notre catégorie dédiée aux [désinfection nettoyage des instruments](#).

