

Aerosept ANIOS - 500 M

Référence 09588



Prix du produit :

7 771,38 € taxe inclu

Description brève du produit :

Aerosept 500 M est un atomiseur autonome conçu pour la désinfection par voie aérienne des **surfaces préalablement nettoyées**, jusqu'à **300 m³**. **Entièrement automatique**, il garantit un **traitement homogène**, sécurisé et conforme à la **norme NFT 72-281 (2014)**.

VENDU À L'UNITÉ.

Description du produit :

Aerosept 500 M, développé par **Anios**, est un **appareil de désinfection autonome par aérosolisation**, spécialement conçu pour traiter des pièces jusqu'à **300 m³**. Grâce à son **procédé entièrement automatisé**, il assure une **désinfection efficace**, homogène et sécurisée des surfaces déjà nettoyées, sans intervention directe de l'opérateur. Doté d'un **pupitre manuel simple d'utilisation**, l'appareil offre un **démarrage différé programmable (1 min)**, permettant à l'utilisateur de quitter la pièce avant diffusion. La **température** de pulvérisation est **maintenue à 55°C**, assurant une **diffusion optimale** du désinfectant avec une **concentration constante de 7 ml/m³**, grâce à un **débit régulé à 0.9 L/h**. Le **remplacement du bidon de 5 litres** est sécurisé par une **canule intégrée**, évitant tout contact direct avec le produit. En fin de cycle, l'appareil s'arrête automatiquement et indique visuellement la réussite de la procédure, avec une validation manuelle de l'intervenant.

Caractéristiques principales

- **Désinfection** aérienne automatique, jusqu'à 300 m³
- **Concentration constante** : 7 ml/m³
- **Température constante de pulvérisation** : 55°C
- **Démarrage différé** automatique (1 min)

- **Capacité** : bidon 5 litres
- **Débit nominal** : 0.9 L/h
- **Multilingue** : Français, Anglais, Espagnol, Polonais, Turc, Portugais, Italien
- **Remplacement sécurisé des bidons**, sans projection
- **Affichage de validation en fin de cycle**
- **Dimensions** : H 900 x L 350 x P 400 mm
- **Poids à vide** : 30 kg
- **Alimentation** : 100-240 VAC – 50/60 Hz – 4.1 A

Avantages

- **Automatisation complète**, sans surveillance nécessaire pendant le cycle
- **Procédé sécurisé et sans contact**, limitant les risques d'exposition
- **Diffusion homogène**, sans variation de concentration
- **Pratique pour les environnements médicaux** ou sensibles
- **Indication claire de fin de désinfection**, avec validation obligatoire

CE. / Conforme NFT 72-281 (2014)

Retrouvez ce produit et bien d'autres dans notre sélection dédiée à la [désinfection par voie aérienne](#), pour une hygiène optimale, homogène et sécurisée.