

# Électrocardiographe 3 pistes portatif 90A Contec - Blanc

Référence 09075



Prix du produit :

**349,00 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Cet **ECG 3 pistes** offre une solution compacte et légère pour des **examens cardiaques** rapides et fiables. Doté de fonctionnalités avancées telles que l'interprétation automatique, un écran tactile et des options de connectivité, cet appareil est idéal pour une utilisation en cabinet, en clinique ou en déplacement.

Description du produit :

Optez pour cet **ECG 3 pistes** pour des diagnostics rapides, précis et fiables, dans un format compact et pratique pour tous les **environnements médicaux**.

## Les points forts de l'ECG 3 pistes

- **Ultra compact et léger** : idéal pour les professionnels en mobilité
- **Analyse complète** grâce aux **12 dérivations standards**
- **Impression immédiate** des tracés en 3 pistes
- **Interface tactile intuitive** pour un gain de temps à l'utilisation

- **Mesure et interprétation automatiques** pour une aide au diagnostic fiable

## Enregistrement et affichage ECG

- Enregistrement des **12 dérivations standards** pour une analyse cardiaque complète
- **Impression thermique intégrée** des tracés ECG en **3 pistes**
- **Écran tactile couleur** de 60 × 35 mm
- Affichage configurable en **1, 3, 6 ou 12 pistes** selon les besoins cliniques

## Modes et paramètres d'enregistrement

- **Modes automatique et manuel**
- **Vitesses d'enregistrement réglables :**  
**1,25 / 12,5 / 25 / 50 mm/s**
- **Sensibilité ajustable :**  
**5, 10 ou 20 mm/mV (±5 %)**
- **Filtres intégrés** pour une qualité de signal optimale :
  - Filtre **AC**
  - Filtre **EMG**
  - Filtre **DFT**

## Mémoire et connectivité

- **Mémoire interne** : jusqu'à **100 ECG** via **carte SD** (non incluse)
- **Port USB** pour le **transfert des données vers un PC**

## Lecture des ECG sur PC

Une fois le fichier ECG transféré :

1. **Vérifiez que la carte SD est bien insérée dans l'appareil**
2. Téléchargez le logiciel de lecture compatible
3. Importez les fichiers ECG pour consultation et archivage sur ordinateur

## Design, transport et alimentation

- **Format compact et portable**
  - Dimensions : **207 x 96 x 62 mm**
  - Poids : **500 g** (avec batterie et papier)
- **Double alimentation** :
  - Secteur
  - **Batterie rechargeable intégrée** offrant jusqu'à **4 heures d'autonomie**

- **Impression thermique** sur papier en rouleau pour des tracés nets et lisibles

## Garantie et conformité

- **Garantie 1 an**

*(hors câbles, accumulateurs et accessoires)*

- **Certification CE** – Conforme aux normes européennes pour un usage médical professionnel

## Contenu de la livraison

L'ECG est livré **prêt à l'emploi**, avec :

- 1 câble patient
- 4 électrodes périphériques
- 6 électrodes à ventouse
- 1 rouleau de papier thermosensible
- 1 câble secteur

Comment lire le fichier ECG lorsqu'il a été transféré sur un PC?

Confirmez que la carte SD est insérée dans la machine, puis téléchargez le logiciel sur l'ordinateur : Adresse de téléchargement : <https://www.dlsoftw.com/>

mot de passe : 03B02161

Connectez ensuite l'ECG90A à l'ordinateur et cliquez sur le bouton "synchroniser"

---

Complétez votre panier afin de bénéficier de la livraison gratuite en ajoutant des :

- [Electrocardiographes de repos](#)
- [Electrocardiographes portable](#)
- [Electrocardiographes avec interprétations](#)
- [Electrocardiographes connectés](#)
- [Electrocardiographes 3 pistes](#)