

GARROT TOURNIQUET REUTILISABLE

Référence 09695

Prix du produit :

16,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Ce **garrot tourniquet** réutilisable est destiné à interrompre la circulation du sang sur un membre supérieur ou inférieur en cas d'hémorragie externe. Posable avec une seule main et résistant à toutes conditions météorologiques.



Description du produit :

Garrot tourniquet réutilisable en polyester et nylon.

Emballé individuellement avec sa notice d'utilisation.

Dimensions :

- Dépliées : 95 x 4 cm
- Pliées : 15 x 4 cm

Poids : 80 g

Indication d'utilisation :

1. Appliquez le garrot à proximité de la zone de saignement et placer le membre blessé à travers la boucle.
2. Tirez la bande très serrée et fixez-la sur elle-même.
3. Collez la bande autour du membre.
4. Tournez la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
5. Placez la tige à l'intérieur du clip et verrouillez.
6. Vérifiez l'état de saignement, appliquez un serrage supplémentaire à côté du garrot et

réévaluez si le saignement persiste.

7. Collez la bande sur la tige à l'intérieur du clip autour du membre.
8. Sécurisez la tige et la bande avec la sangle, transportez réévaluez, & enregistrez le temps appliqué sur la sangle blanche si possible.