

# PANSEMENT TULLE GRAS MEDITULLE

Référence 09742



Prix du produit :

**3,59 € taxe inclu**

Description brève du produit :

Les **compresses grasses Meditulle** facilitent le traitement et les plaies dues aux brûlures.

Favorisant une **cicatrisation rapide**, elles permettent également d'apaiser la douleur du patient et de réduire les risques de formation de cicatrices.

Description du produit :

Protégeant le patient de l'infection, ces **compresses** sont douces et ne collent pas à la plaie tout en étant résistantes à l'effilochage.

Grâce à leur support en gaze de coton, à leur base émolliente et à leur film transparent, ces compresses grasses **Meditulle** offrent une protection optimale.

Caractéristiques :

- A usage unique
- Stérile et Sans latex
- 2 tailles : 5x5 et 10x10 cm
- Dispositif Medical de Classe IIb
- LPPR : Oui

Boîte de 10

**Comment utiliser les compresses médicales Meditulles ?**

1. Une fois la plaie nettoyé ou désinfecté, placez les compresses Meditulle® de manière a les

positionner à 1 cm de la plaie et en les faisant chevaucher légèrement cette dernière.

2. En fonction du niveau d'exsudat de la plaie, appliquez un pansement absorbant, sur la compresse de vaseline.
3. La durée pendant laquelle le pansement doit rester en place dépend des recommandations du médecin et de la situation clinique. En général, la vaseline est absorbée en 1 à 3 jours.
4. Évitez d'utiliser un pansement occlusif en présence d'une infection pour ne pas dissimuler une possible aggravation de la plaie.