

Électrodes ECG Micropore 50mm HOLTER

Référence 09957



Prix du produit :

12,23 € taxe inclu

Description brève du produit :

L'électrode ECG Holter Micropore 50 mm est spécialement conçue pour les **enregistrements prolongés** (Holter, monitoring continu 24–72h). Son **support microporeux hypoallergénique** assure une excellente tolérance cutanée, même chez les patients à la peau sensible, tout en garantissant une **adhérence fiable** pour maintenir la qualité du signal durant toute la durée de l'examen.

Description du produit :

Avantages clés

- **Support microporeux?**: respirant, limite la macération et préserve le confort cutané sur plusieurs jours.
- **Prégélifiée?**: prête à l'emploi, pose rapide, contact homogène peau-capteur pour réduire l'impédance.
- **Hypoallergénique et sans latex?**: minimise le risque de réaction cutanée, adaptée à un usage hospitalier.
- **Adhésivité fiable?**: adaptée aux mouvements de la vie quotidienne pendant l'enregistrement Holter.
- **Performance technique optimisée?**: signal stable, réduction des artefacts et des pertes de contact.

Spécifications techniques

- Diamètre?: 50 mm
- Support?: microporeux, sans latex

- Gel?: conducteur à base d'eau
- Usage unique, pré-gélifiée
- Tension de polarisation continue (60')?: 0,8 mV
- Impédance à 10?Hz (60')?: 121 ?
- Rétablissement surcharge de défibrillation (5')?: 12,5 mV
- Conditionnement?: sachet de 60 électrodes
- Conformité?: norme AAMI 12?158/1991, marquage CE

Conseils d'utilisation

- **Préparer la peau**?: nettoyer, sécher, dégraisser à l'alcool isopropylique (laisser évaporer), tondre si nécessaire.
- **Placement**?: respecter les repères anatomiques et le code couleur des membres pour une lecture optimale.
- Éviter les plis et bulles lors de la pose, exercer une pression ferme et brève pour activer l'adhésion.
- Surveiller régulièrement l'intégrité cutanée et l'adhérence sur poses prolongées.