

Dermatoscope HEINE DELTA one + Adaptateur universel smartphone offert

Référence 08011



Prix du produit :

1 049,00 € taxe inclu

Description brève du produit :

Profitez d'une offre exceptionnelle sur **dermatoscope Delta one Heine** plus 1 **Adaptateur universel pour smartphone** offert

Petit à l'extérieur, grand à l'intérieur : une image cristalline grâce à l'optique achromatique **HEINE**, avec polarisation, LED HQ, et un format qui se glisse dans la poche.

Description du produit :

Dermatoscope HEINE DELTA one + Adaptateur universel smartphone offertLe **dermatoscope Heine DELTA one** est un investissement judicieux pour les professionnels de santé qui recherchent un outil de diagnostic fiable, performant et polyvalent.

Sa technologie de pointe, son ergonomie remarquable et ses fonctionnalités avancées en font un choix incontournable pour une pratique dermatologique moderne et efficace.

Point fort :

- Lentille achromatique de 22 mm de diamètre : Grossissement jusqu'à 10x sans déformation pour une image d'une netteté exceptionnelle.
- Système optique achromatique **HEINE** : Élimination des aberrations chromatiques pour une restitution parfaite des couleurs.
- LED HQ haute performance : Éclairage homogène et intense pour une observation précise

des détails les plus fins.

- Champ de vision de 21 mm : Permet d'examiner de grandes zones cutanées en un seul coup d'œil.
- Polarisation commutable : Élimine les reflets et les brillances pour une visualisation optimale des structures cutanées.

Option HEINE DERM app (documentation patient)

Le DELTA one peut être associé à un smartphone via :

- une **coque d'adaptation** (optionnelle)
- et l'app **HEINE DERM app (compatible iPhone uniquement)**

L'app permet : documentation patient, placement sur schéma corporel, annotations (indication/diagnostic/traitement), partage d'images, et **zoom numérique jusqu'à 40x** (à partir du zoom optique 10x).

Adaptateur universel DELTA ONE (OFFERT)

L'adaptateur universel fonctionne avec la plupart des OS (**Android, iPhone 6 et +, Windows...**).

Pré-requis :

- une **coque de téléphone en plastique dur et lisse**
- la caméra **ne doit pas dépasser** de la coque
- fixation sur la **caméra arrière principale**

Installation :

1. Retirer le film de protection et **coller** l'adaptateur sur la caméra principale
2. Connecter la bague de mise au point du dermatoscope à la **bague aimantée**
3. Ouvrir l'appareil photo ? prise d'images avec une qualité "dermatoscope"

Caractéristiques techniques

- **Grossissement** : 10x

- **Champ de vision** : Ø 21 mm
- **Optique** : lentille achromatique Ø 22 mm
- **Éclairage** : **LED HQ** haute performance
- **Modes** : lumière **polarisée / non polarisée**
- **Niveaux lumineux** : 3
- **Coloris** : **Noir** ou **Blanc**
- **Dispositif médical** : **Oui** (marquage **CE**) – destiné aux **professionnels de santé**
- **Garantie** : 5 ans

Spécificités :

- Fonction « Toggle » pour passer du mode d'éclairage polarisé au mode non polarisé
- 3 niveaux de luminosité
- Grossissement x10
- Témoin de charge

Contenu de la boîte

- 1 **Dermatoscope HEINE DELTA one**
- 1 **Embout de contact avec graduation**
- 1 **Câble USB** + bloc d'alimentation enfichable (applications médicales)
- 1 **Étui de rangement**

FAQ (questions fréquentes)

L'adaptateur offert remplace-t-il la coque d'adaptation HEINE ?

Non : l'adaptateur universel sert à prendre des images via la caméra du téléphone. La **coque d'adaptation + HEINE DERM app** est une solution dédiée (app iPhone).

Est-ce que ça fonctionne si mon téléphone a plusieurs caméras ?

Oui, il faut le positionner sur la **caméra principale** (souvent celle utilisée par défaut en mode photo).

Est-ce que je peux l'utiliser sans contact ?

Oui, l'observation sans contact est annoncée jusqu'à **40–50 cm**.

1 ACHETÉ



OFFERT


**1 DERMATOSCOPE DELTA ONE ACHETÉ =
1 ADAPTATEUR SMARTPHONE OFFERT**



HEINE DERM app

AVANTAGES:

- Enregistrement dans
- Suivi de la pathologie
- Graduation
- Application mobile HEINE
- Facile d'utilisation avec fixation
- Compatible pour tous les smartphones

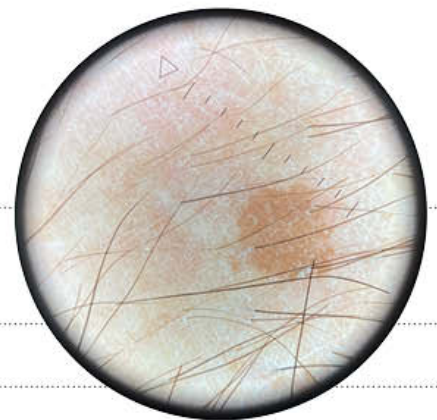

Informations complémentaires :

- Article : **Dermatoscope HEINE DELTA one**
- Fabricant : **Heine**
- Dispositif médical : Oui
- Fonction : Observation des lésions cutanées de la peau
- Réglementation : Cet article est un dispositif médical destiné au professionnel de santé, qui bénéficie d'un marquage CE - Conforme à la réglementation de santé publique.

Garantie 5 ans. CE.

Retrouvez également tout nos [Dermatoscope](#)