


Canule de Guedel stérile

Référence 00457

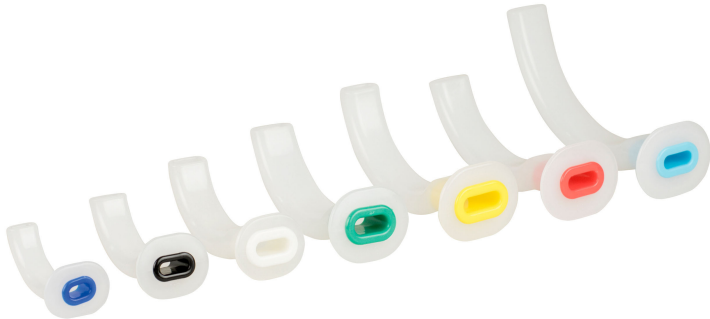

Prix du produit :

10,10 € taxe inclu

Description brève du produit :

La canule de guedel stérile est un dispositif médical qui permet d'éviter l'affaissement de la langue dans la gorge et le maintien des voies aériennes jusqu'au poumons du patient lorsqu'il est inconscient, par exemple lorsque le patient est dans un coma profond, ou en cas de crise d'épilepsie. **Disponibles en différentes tailles**, les canules sont **facilement identifiables grâce à un code couleur**.

Vendu en boîte 10

Description du produit :

Canules de Guedel stériles et semi-souples faciles à mettre en place.

Canules de forme anatomique, conçues pour le maintien des voies aériennes ouvertes d'un patient (empêche l'affaissement de la langue)

Canule de Guedel stérile en polyéthylène semi-souple

La canule doit être adaptée à l'âge et à la morphologie du patient, elles sont donc déclinées en plusieurs tailles suivant un code couleur facile à identifier.

Code couleur :

N° 00 Bleu 50 mm

N° 0 Noir 60 mm

N° 1 Blanc 70 mm

N° 2 Vert 80 mm

N° 3 Jaune 90 mm

N° 4 Rouge 100 mm

N° 5 Cyan 110 mm

La canule de Guedel comporte 3 parties :

- Colerette, qui doit rester à l'extérieur de la bouche
- Partie courte droite et dure que le dents ne peuvent pas mordre.
- Partie courbe épousant la forme de la langue

Vendu en boîte 10.

Utilités de la canule de Guedel (appelée aussi canule MAYO)

Les 3 principales fonctions de cette canule sont :

- Maintenir la langue pour qu'elle ne puisse pas tomber dans la gorge lorsque le patient est sur le dos.
- D'éviter la morsure pouvant entraîner des lésions en cas de crise d'épilepsie.
- Libérer le passage de l'air à travers la lumière de la canule.

Qu'est-ce qu'une canule de Guedel (ou canule oropharyngée) ?

Inventée par le médecin anesthésiste américain Arthur E. Guedel, ce dispositif médical permet de préserver le passage de l'air jusqu'au poumon chez une personne inconsciente.

Chez un adulte, la canule est insérée pointe vers le haut puis retournée vers le bas lorsqu'elle est complètement enfoncée.

Chez un enfant elle est insérée directement pointe vers le bas.

La canule de Guedel doit être utilisée uniquement sur des patients inconscients (score de Glasgow 5), en arrêt respiratoire ou sédaté.

Produits complémentaires

Nous proposons également le matériel médical complémentaire aux canules qu'on peut trouver dans une ambulance ou des services d'intervention ou de réanimation. Par exemple les [Insufflateurs à usage unique](#) ou nos [couvertures de survie](#).